



## Alu-Band-Rolle (Metallagerungsschienen)



### Alu-Band-Rolle Nils, 3 m lang, gepolstert

Artikelnummer-ID: 10320000;64

Merkmal: 15 mm breit

Artikelnummer-ID: 10320000;73

Merkmal: 19 mm breit

Artikelnummer-ID: 10320000;92

Merkmal: 25 mm breit

Medizinprodukt der Klasse 1



### 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Anwendung erfolgt durch Fachpersonal.
- Das einseitige mit Schaumstoff gepolsterte Alu-Band besteht aus einem 1 mm dicken Alu-Band und einer Schaumstoffbeschichtung von ca. 1 cm.
- Durch die hohe Biegsamkeit kann sie der Fingerform optimal angepasst werden; die benötigte Länge wird mit einer Blehschere abgeschnitten.
- Die Schiene ist so lang zu wählen, dass sie dorsalseitig über die Fingerkuppe des verletzten Fingers übergreift. Um ein Verrutschen zu verhindern, kann sie mit mehreren Pflasterstreifen semizirkulär am Finger befestigt werden. Die endgültige Fixierung kann mit einer Mullbinde oder ähnlichem erfolgen.
- Abhängig von der Stärke des Fingers des jeweiligen Patienten, ist die Breite (15 mm, 19 mm oder 25 mm) des Alu-Bandes zu wählen.
- Indikation: Stützverband zur Ruhigstellung der Finger bei Frakturen und anderen Verletzungen.

- Bevor der Stützverband angelegt wird, sollte der zu behandelnde Finger mit einem einfachen Verband überzogen werden.
- Der Verband bleibt röntgenfähig.

## 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Das Alu-Band ist regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu untersuchen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Beim Abschneiden, Zuschneiden und Kürzen der Meterware ist darauf zu achten, dass keine scharfen Kanten entstehen, die Verletzungsgefahren bergen könnten.
- Vorsicht beim Anlegen des Stützverbandes: Druckstellen vermeiden, nicht auf offenen Wunden anbringen, bei Taubheitsgefühlen sofort Verband überprüfen und Fachpersonal zu Rate ziehen.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden ([info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)).

## 3. Reinigung und Desinfektion:

Das gepolsterte Alu-Band ist zum einmaligen Gebrauch gedacht und nicht zum Reinigen geeignet. Nach Gebrauch sollte es entsorgt werden.

## 4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten) achten: Die Enden müssen immer stumpf abgeschnitten sein.

## 5. Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über den Hausmüll / Restmüll.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
[www.dr-koch.de](http://www.dr-koch.de), [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)