



## Alu-Schiene (Metallagerungsschienen)



### Alu-Schiene Ingo, beidseitig gepolstert

Artikelnummer-ID: 10322000;88

Merkmal: 20x3 cm

Artikelnummer-ID: 10322000;89

Merkmal: 20x5 cm

Artikelnummer-ID: 10322000;111

Merkmal: 30x5 cm

Artikelnummer-ID: 10322000;132

Merkmal: 40x7 cm

Artikelnummer-ID: 10322000;134

Merkmal: 40x9 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



### 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Anwendung erfolgt durch Fachpersonal.
- Die mit Schaumstoff gepolsterte Alu-Schiene besteht aus einem 1 mm dicken Aluminium-Stab, dieser ist von beiden Seiten mit dem Schaumstoff gepolstert.
- Durch die hohe Biegsamkeit kann die Alu-Schiene der Anwendungsstelle optimal angepasst werden; die benötigte Länge wird mit einer Blechschere abgeschnitten.
- Diese Schienen werden zur Ruhigstellung und Lagerung von Verletzungen verwendet. Zunächst wird die verletzte Stelle mit einer Wundauflage versorgt. Dann erst wird auf der Schiene gelagert und mit einem Bindeverband fixiert.
- Indikation: Stützverband zur Ruhigstellung bei Frakturen und anderen Verletzungen.

## 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Die Alu-Schiene ist regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu untersuchen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Beim Abschneiden, Zuschneiden und Kürzen der Meterware ist darauf zu achten, dass keine scharfen Kanten entstehen, die Verletzungsgefahren bergen könnten.
- Vorsicht beim Anlegen des Stützverbandes: Druckstellen vermeiden, nicht auf offenen und entzündeten Wunden anbringen, bei Taubheitsgefühlen sofort Verband überprüfen und Fachpersonal zu Rate ziehen.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden ([info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)).

## 3. Reinigung und Desinfektion:

Die Alu-Schiene ist zum einmaligen Gebrauch gedacht und nicht zum Reinigen geeignet. Nach Gebrauch sollte sie entsorgt werden.

## 4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten) achten:  
Die Enden müssen immer stumpf abgeschnitten sein.

## 5. Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über den Hausmüll / Restmüll.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
[www.dr-koch.de](http://www.dr-koch.de), [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)