



Aluminiumschiene (Metallagerungsschienen)



Aluminiumschiene Bea, einseitig gepolstert
Artikelnummer-ID: 10340000;0
Merkmal: 40x9 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Anwendung erfolgt durch Fachpersonal.
- Die einseitige mit Schaumstoff gepolsterte Aluminiumschiene besteht aus einem 1 mm dicken Aluminium-Stab und einer Schaumstoffbeschichtung aus ca. 5 mm.
- Durch die hohe Biegsamkeit kann die Alu-Schiene der Anwendungsstelle optimal angepasst werden; die benötigte Länge wird mit einer Blechschere abgeschnitten.
- Diese Schiene ist für die Ruhigstellung, Schonung, Fixierung usw. von Unter- und Oberarm geeignet. Sie ist einseitig mit Schaumstoff gepolstert und durch das Aluminium röntgenfähig.
- Indikation: Stützverband zur Ruhigstellung bei Frakturen und anderen Verletzungen.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.

- Die Aluminiumschiene ist regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu untersuchen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Beim Abschneiden, Zuschneiden und Kürzen der Meterware ist darauf zu achten, dass keine scharfen Kanten entstehen, die Verletzungsgefahren bergen könnten.
- Vorsicht beim Anlegen des Stützverbandes: Druckstellen vermeiden, nicht auf offenen und entzündeten Wunden anbringen, bei Taubheitsgefühlen sofort Verband überprüfen und Fachpersonal zu Rate ziehen.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Die Aluminiumschiene ist zum einmaligen Gebrauch gedacht und nicht zum Reinigen geeignet. Nach Gebrauch sollte sie entsorgt werden.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten) achten:
Die Enden müssen immer stumpf abgeschnitten sein.

5. Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über den Hausmüll / Restmüll.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de