



## Armlagerungskeil nach Magnus (Schaumstofflagerungsschienen)



**Armlagerungskeil nach Magnus;**  
**Lagerungsfläche 53x22 cm, Höhe 30 cm**  
Artikelnummer-ID: 10740000;0  
Merkmal: 53x22x30 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



### 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Der Armlagerungskeil nach Magnus dient der Armlagerung, speziell im Krankenbett bei hochgestelltem Kopfteil. Er kann als Therapiehilfe benutzt werden, um dem Patienten die optimale Lagerung zu bieten.
- Einsatzmöglichkeiten: Krankenhaus, Reha, Physiotherapie, häuslichen Pflege.
- Der Lagerungskeil besteht aus einem Schaumkörper bezogen mit einem Kunstlederbezug mit Reißverschluss.

### 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen und desinfizieren.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.

- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden ([info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)).

### 3. Reinigung und Desinfektion:

Grobe Verunreinigungen können mit einem Gemisch aus milden, neutralen haushaltsüblichen Reinigern und Wasser mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

Anschließend kann das Produkt mit milden handelsüblichen Desinfektionsmittel oder Desinfektionstüchern desinfiziert werden.

Duftstoffe und rückfettende Mittel sind als Inhaltstoffe ungeeignet; sie könnten zu Trübungen und Streifen an der Oberfläche des Keils führen. Der regelmäßige Einsatz von alkohol- bzw. lösemittelhaltigen Erzeugnissen kann zu negativen Beeinflussungen der Oberflächen sowie einer langfristige Material Versprödung führen.

Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistung auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit ablehnen.

Der Schaumkörper in der Kunstlederhülle kann nicht gereinigt werden.

### 4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

### 5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
[www.dr-koch.de](http://www.dr-koch.de), [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)