



## Hochlagerungskeil (Schaumstofflagerungsschienen)



### Hochlagerungskeil Lou mit Nesselbezug

Artikelnummer-ID: 10740100;0

Merkmal: 65x25 cm, Höhe 36 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



### 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Der Hochlagerungskeil findet seine Anwendung bei der Therapie des Armödems. Er kann als Therapiehilfe benutzt werden, um dem Patienten die optimale Lagerung zu bieten.
- Einsatzmöglichkeiten: Krankenhaus, Reha, Physiotherapie, häuslichen Pflege.
- Der Lagerungskeil besteht aus einem Schaumkörper bezogen mit einem Nesselbezug mit Reißverschluss.

### 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehenes Zubehör verwendet wird.

- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden ([info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)).

### 3. Reinigung und Desinfektion:

Der Nesselbezug kann abgenommen werden und bei 30°C mit gleichen Farben in der Maschine gewaschen werden.

Der Schaumkörper in der Nesselhülle kann nicht gereinigt werden.

### 4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

### 5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
[www.dr-koch.de](http://www.dr-koch.de), [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)