

Distributed by



dr. paul koch
GESUNDHEITSPRODUKTE

Gebrauchsanweisung

Infusionsstative

Infusionsstativ Homecare, klappbar

REF: 0833160

UDI-DI: 4260661457575

**Ihr Spezialist für
mehr Gesundheit**

Traditionsunternehmen seit 1879



1	Allgemeine Angaben.....	3
1.1	Hinweise und deren Bedeutung	3
1.2	Informationen zur Gebrauchsanleitung.....	4
1.3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
1.4	Haftung und Gewährleistung.....	4
1.5	Typenschild	5
2	Sicherheit	6
3	Montage	7
4	Bedienung	8
4.1	Schraub-Höhenverstellung.....	8
5	Reinigung und Pflege	9
6	Wartung Pflege.....	10
7	Umgebungsbedingungen	10
8	Wartungsnachweis	11
9	Lebensdauer	12
10	Service	12
11	Technische Daten.....	12

1 Allgemeine Angaben

1.1 Hinweise und deren Bedeutung

GEFAHR

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Gefahr" kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises führt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

WARNUNG

Das Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Warnung" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen.

VORSICHT

Das Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Vorsicht" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen. Darf auch für Warnungen vor Sachschäden verwendet werden.

ACHTUNG

Das Symbol kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Produktes und/oder anderer Anlagenteile zur Folge haben.

HINWEIS

Hier finden Sie Informationen oder Hinweise.

1.2 Informationen zur Gebrauchsanleitung

Die Produkte sind technische Hilfsmittel. Sie sind erklärungsbedürftig, benötigen eine regelmäßige Pflege und bergen bei unsachgemäßem Gebrauch Gefahren in sich.

Deshalb muss die richtige Handhabung erlernt werden.

Die vorliegende Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen, sich mit der Handhabung des Produkts vertraut zu machen sowie Unfälle zu vermeiden.

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Produkte der Produktgruppe "Stative ohne Rollfuß" (z.B. Bettstative) dienen der Aufhängung von Infusions- und Nährlösungen in Beutel- oder Flaschenform. Die Infusions-Einlaufgeschwindigkeit wird dabei nach medizinischen Gesichtspunkten auf Anordnung des Arztes durch entsprechende Einstellung der relativen Aufhängungshöhe zum Patienten beeinflusst. Die Befestigung der Stative erfolgt ausschließlich senkrecht in einer speziellen Aufnahme an einer dafür geeigneten standsicheren Vorrichtung (Bett, Stuhl, Wagen etc.).

Je nach Ausführung ist es möglich medizinische Geräte am unbeweglichen Teil des Infusionsständers (am Außenrohr) zu befestigen.

1.4 Haftung und Gewährleistung


Für dieses Produkt gilt im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzliche Gewährleistung.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

ACHTUNG

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.5 Typenschild

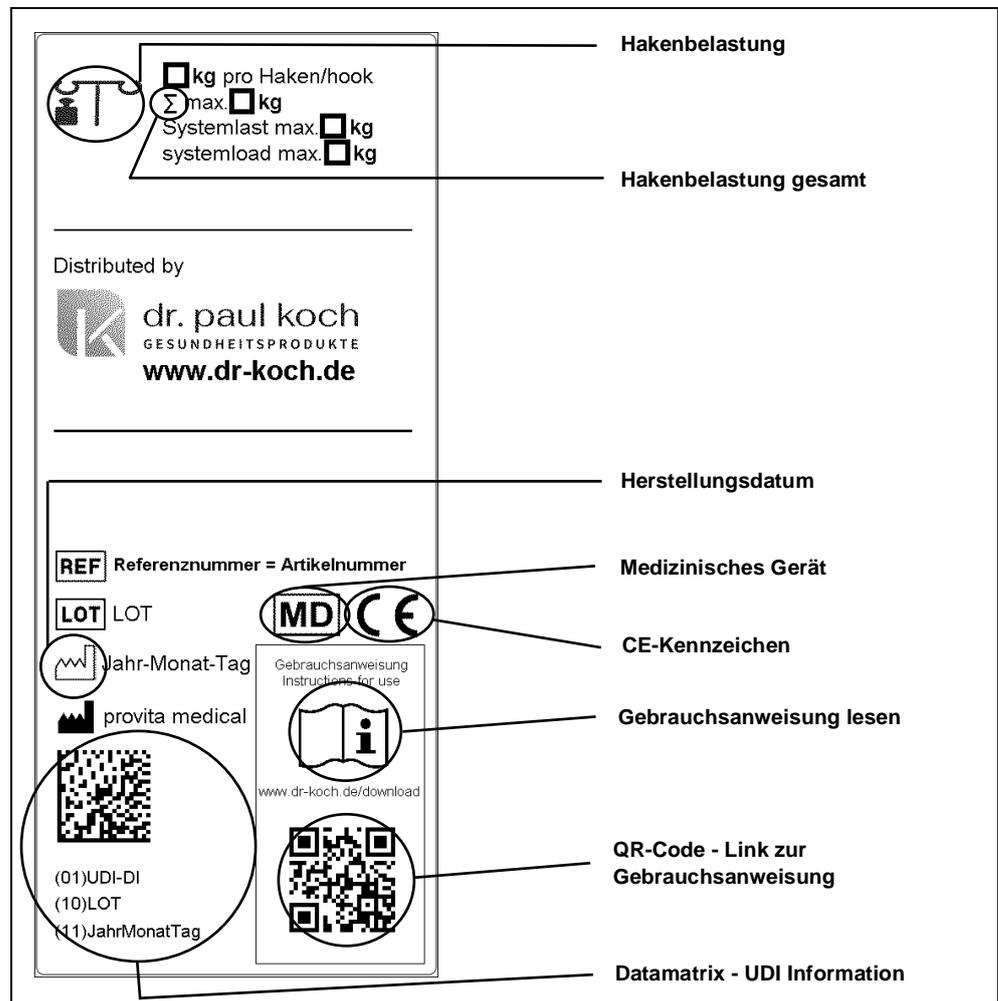

2 Sicherheit

GEFAHR

Die Montage, Handhabung und Benutzung darf nur durch geschulte Personen erfolgen und setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus. Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für Personen und Sachgegenstände entstehen!

GEFAHR

Um gefährliche Situationen zu vermeiden, sollten der Umgang mit dem Infusionsstativ geübt werden.

- Das Gerät ist nur für die in der Bedienungsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung kann unerkannte Gefahren in sich bergen und ist zu unterlassen.
 - **Die Angaben für die möglichen maximalen Belastungen der Haken; Haken gesamt und Systemlast entnehmen Sie aus dem Typenschild das auf dem Infusionsstativ angebracht ist.**
 - Die Kippsicherheit (Standicherheit) ist bei einer Last von 1 kg bis 5° Schräglage gewährleistet. Stellen Sie den Infusionsständer jedoch nie auf schiefen Ebenen ab!
 - Es dürfen NUR Infusionsflaschen und Beutel an den Infusionsständer gehängt werden.
 - Klemmschrauben (5, 7) immer nur so fest anziehen, dass die Last gerade sicher gehalten wird. Das Überdrehen der Klemmschrauben kann die Funktion beeinträchtigen.
 - Beachten Sie die zusätzlichen Anforderungen und Sicherheitshinweise des Systems, woran das Infusionsstativ angebracht wird.
 - Vor der Anwendung des Infusionsstativ **kontrollieren Sie bitte, ob alle angebauten Teile ordentlich befestigt und nicht beschädigt sind.**
 - Zum Transport mit angebrachten Infusionsbehältern das Stativ immer in der Nähe des Flaschenkreuzes festhalten. Bei Nichtbeachtung kann das Stativ kippen!
-

ACHTUNG


Für Schäden durch nicht oder mangelhaft durchgeführte Wartung oder durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Befolgen der Gebrauchsanweisung und der Wartungshinweise bilden einen wesentlichen Teil der Garantiebedingungen.

Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle/Störfälle


Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sind, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unter Einhaltung der Meldefristen der MDR gemeldet werden.

3 Montage

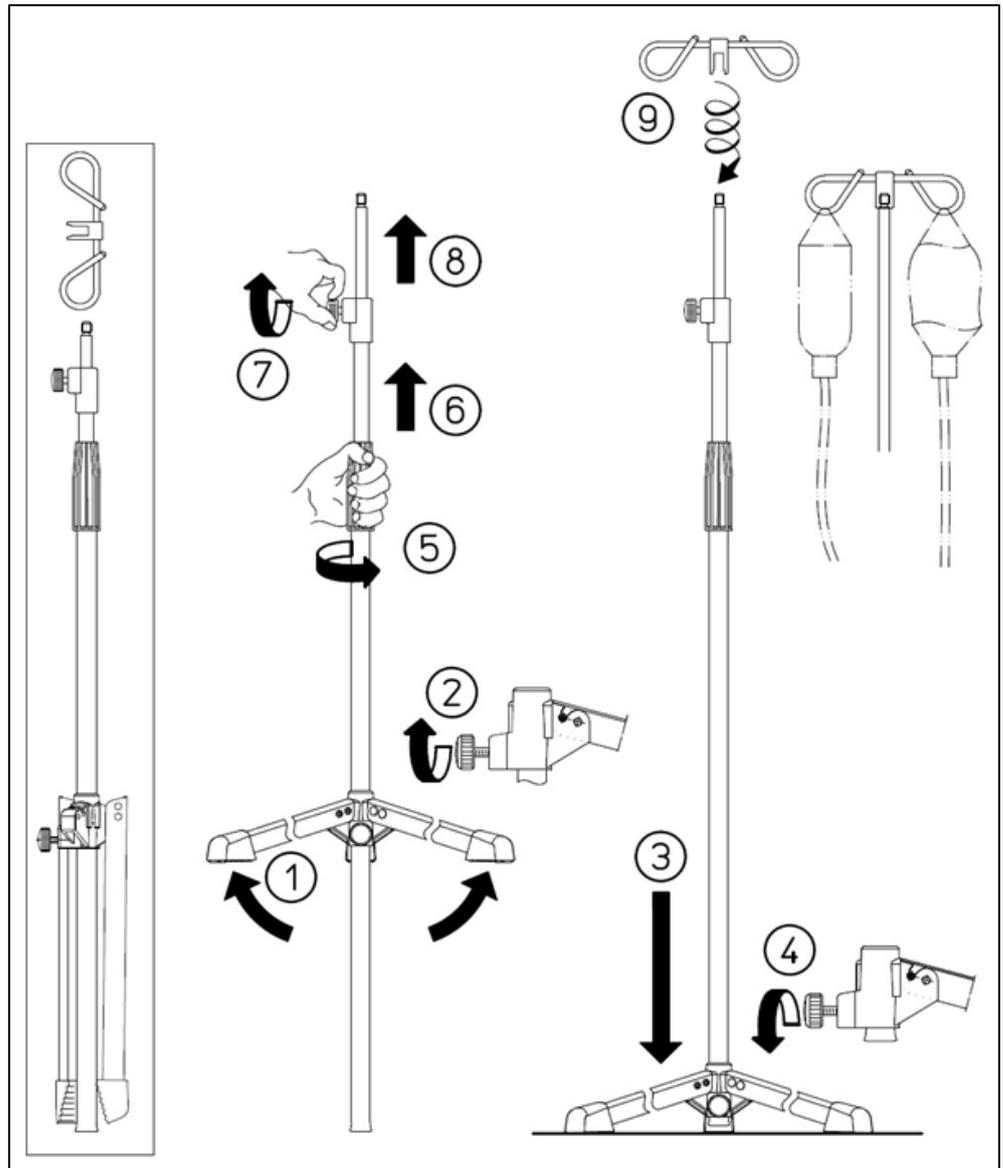

4 Bedienung

4.1 Schraub-Höhenverstellung

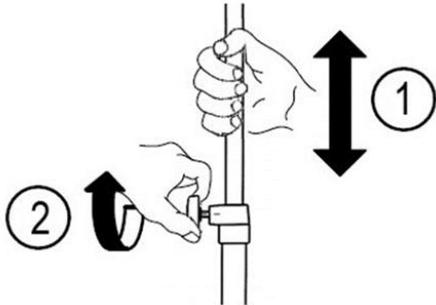

Halten Sie zur Höhenverstellung das obere Rohr ① fest und lösen Sie danach die Klemmschraube ②. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und schrauben Sie die Klemmschraube wieder fest. Lassen Sie das obere Rohr erst los, wenn die Klemmung für die gewünschte Nutzung ausreichend ist. Bitte bedenken Sie hierbei das noch hinzukommende Gewicht der Infusionsbehälter.

⚠ WARNUNG

Gefahr einer Augenverletzung. Halten Sie einen sicheren Abstand zu den Flaschenhaken ein!

Gefahr einer Quetschung von Fingern bzw. der Hand durch die Betätigung der Höhenverstellung!

Gefahr durch unkontrolliertes Absenken der Last durch die Betätigung der Höhenverstellung!

5 Reinigung und Pflege

ACHTUNG

Chloridhaltige Flüssigkeiten (z.B. Blut, physiologische Kochsalzlösungen) müssen entfernt werden, um eine Rostbildung zu vermeiden. Nach der Entfernung mit Wasser reinigen, um Rückstände vollständig zu entfernen.

ACHTUNG

Beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers, sowie die aktuell gültigen Hygienevorschriften.

ACHTUNG

Nicht pH-neutrale und chemisch aktive Desinfektionsmittel können in Abhängigkeit von Einwirkzeit und „Aggressivität“ (pH-Wert, chemische Reaktivität, Aggressivität v. Lösungsmitteln) zu Oberflächen- und Materialschäden führen.

Bei der Reinigung und Desinfektion sollten daher folgende Produkte / Inhaltsstoffe nicht verwendet werden:

- kohlenwasserstoffhaltige Lösungsmittel (Benzin, Verdünnung). Diese können Beschichtungen und Kunststoffe schädigen.
- Mittel mit einem Alkoholgehalt von mehr als 10%. Diese können Beschichtungen und Kunststoffe schädigen.
- starke Säuren oder Laugen
- Halogenide oder Halogen abspaltende Verbindungen (Chlor, Brom, Jod). Diese können auch auf Edelstahl Korrosion verursachen.
- Produkte, die die Oberfläche zerkratzen (z.B. Scheuermittel, Drahtbürsten, Stahlwolle), eisenpartikelhaltiges Wasser, Reinigungsschwämme und salzsäurehaltige Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Keine maschinellen Reinigungs- oder Desinfektionsverfahren anwenden! (Waschanlagen, Hochdruckreiniger)

6 Wartung Pflege

Das Produkt muss mindestens einmal im Jahr von qualifiziertem Personal auf volle Funktionen und Vollständigkeit aller Bauteile kontrolliert werden:

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Wartungsnachweis auf Seite 11.

Wird ein Fehler festgestellt, so dürfen nur Originalersatzteile verwendet, und nur von einem Fachmann bzw. Kundendienst ausgetauscht werden.


Die Entsorgung des Produkts kann über den örtlichen Sperrmüll erfolgen.

Zur langen Aufbewahrung des Produkts sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Vor der Wiederinbetriebnahme nach längerer Standzeit sollte das Produkt gemäß dem Wartungsplan / Checkliste überprüft werden.

7 Umgebungsbedingungen

Für Transport und Lagerzeiten gelten folgende Lagerbedingungen:

Temperatur:	- 25 bis 70 °C
Relative Feuchte:	30 – 75 %
Luftdruck:	700 – 1060 hPa

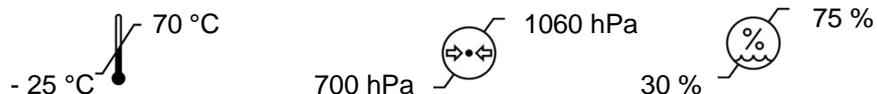

Bei Gebrauch ist die Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C einzuhalten.

9 Lebensdauer

Wir gehen bei dem Produkt von einer zu erwartenden Lebensdauer von 7 Jahren aus, wenn das Produkt ausschließlich nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzt wird, und die regelmäßigen Wartungen ordnungsgemäß ausgeführt werden.

Die Lebensdauer ist maßgeblich abhängig von der Benutzungshäufigkeit, der Einsatzumgebung und der Pflege.

Durch Verwendung von Ersatzteilen lässt sich die Lebensdauer des Produkts verlängern. Wenden Sie sich an den Hersteller für weitere Informationen.

Die angegebene Lebensdauer stellt keine zusätzliche Garantie dar.

10 Service

Für Fragen zum Produkt, für Reparaturfälle und Angabe von Servicepartnern, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Adressdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.

11 Technische Daten

Typenschild:	am Produkt
Lebensdauer:	7 Jahre



dr. paul koch GmbH

Im Geiselrain 7
D-72636 Frickenhausen
Germany

Phone +49 (0) 7022 / 40595 – 0
Fax +49 (0) 7022 / 40595 – 55

www.dr-koch.de