



## Injektionskissen PU (Schaumstofflagerungsschienen)



**Injektionskissen Ava, PU-beschichtet,  
elfenbeinweiß**

Artikelnummer-ID: 10850130;221

Merkmal: elfenbeinweiß, 30x15 cm, 7,5/4 cm hoch

Artikelnummer-ID: 10850131;221

Merkmal: elfenbeinweiß, 45x15 cm, 8/4 cm hoch

**Injektionskissen Ava, PU-beschichtet,  
dunkelblau**

Artikelnummer-ID: 10850131;217

Merkmal: dunkelblau, 45x15 cm, 8/4 cm hoch

Medizinprodukt der Klasse 1



### 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Injektionskissen dienen der Auflage, Ruhigstellung und der Unterstützung des Patientenarms während einer Infusion oder einer Blutabnahme. Die Injektionskissen sind aus PUR-Schaumstoff mit einer PU-Beschichtung.
- Die Anwendung erfolgt von Fachpersonal.

### 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen und desinfizieren.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Sollte das Produkt erhebliche Gebrauchs- und Verschleißerscheinungen zeigen, sollte es ersetzt werden.

- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden ([info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)).

### 3. Reinigung und Desinfektion:

Die Injektionskissen mit PU-Beschichtung können mit nebelfeuchten Tüchern abgewaschen werden und sind wischdesinfizierbar. Die Desinfektion kann mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

### 4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten) achten. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur erfolgen.

Direkte Sonneneinstrahlung und große Hitzeeinwirkungen sind zu vermeiden.

### 5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
[www.dr-koch.de](http://www.dr-koch.de), [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)