



dr. paul koch®
GESUNDHEITSPRODUKTE

Willkommen bei Dr. Paul Koch – Qualität mit Tradition seit 1879

Seit über 140 Jahren steht der Name Dr. Paul Koch für hochwertige Gesundheitsprodukte, entwickelt mit Sorgfalt, Erfahrung und dem Anspruch, Menschen im Alltag zuverlässig zu unterstützen.

Als familiengeführtes Unternehmen in fünfter Generation verbinden wir traditionelle Werte mit modernem Know-how, um Ihnen stets durchdachte und langlebige Lösungen bieten zu können.

Mit unseren Krücken und Gummistopfen setzen wir diese Linie fort – entwickelt mit Blick auf Ergonomie, Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Ihre Gesundheit und Mobilität liegen uns am Herzen.

In dieser Anleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zur sicheren Nutzung und Pflege des Produkts. Sollten darüber hinaus Fragen auftauchen oder wider Erwarten ein Problem mit dem Produkt auftreten, stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Qualität von Dr. Paul Koch – Erfahrung, auf die man sich verlassen kann.

Kontakt:

Dr. Paul Koch GmbH
Im Geiselrain 7
72636 Frickenhausen

Telefon: +49 (0) 70 22 / 4 05 95 -0
Telefax: +49 (0) 70 22 / 4 05 95 -55
E-Mail: info@dr-koch.de
Web: www.dr-koch.de



Dr. Paul Koch



Wieditz GmbH
DE-48477 Hörstel, Dornierstr. 14
Telefon: 05459/93280
E-Mail: info@wieditz.de
Version: 1.0 (Stand 31.01.2025)

Bedienungsanleitung

Gummistopfen Art.-Nr 2021-16

Eigengewicht: 46 Gramm

1. Zweckbestimmung

Die rutschhemmenden Gummistopfen werden an Gehhilfen mit einem Außenrohrdurchmesser von 17 mm montiert. Durch das TPE Material der Gummistopfen werden Stöße gemindert und der Komfort beim Laufen verbessert.

2. Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor jeder Verwendung Ihre Gehhilfe auf ihre Funktionstüchtigkeit sowie einen festen Sitz des Gummistopfens. Überprüfen Sie die Gummistopfen regelmäßig auf Beschädigung oder Abnutzung und tauschen Sie diese, wenn nötig, aus. Die Gefahr des Wegrutschens oder eines Sturzes - insbesondere auf glatten und nassen Untergründen - kann bei der Verwendung von Gehhilfen niemals völlig ausgeschlossen werden. Setzen Sie die Gehstütze beim Laufen so senkrecht wie möglich und nicht zu weit vom Körper entfernt auf. Ein sehr schräges Aufsetzen erhöht das Sturzrisiko!

3. Material

Das Material der Gummistopfen ist TPE mit einer Stahleinlage. Die Gummistopfen haben eine Stahleinlage im Inneren, um ein Durchstoßen des Rohres zu verhindern.

4. Lagerung und Reinigung

Bitte lagern Sie die Gummistopfen an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die Reinigung kann mit Wasser erfolgen.

5. Gewährleistung und Haftung

Sie haben ein hochwertiges Produkt aus dem Hause Wieditz erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht der Firma Wieditz das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Für Schäden, die durch Veränderungen an unserem Produkt entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Verschleißteile (wie z.B. Gummistopfen) sowie Mängel, die auf eine unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Es dürfen nur Originalersatzteile aus dem Hause Wieditz verwendet werden. Für Ersatzteile und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. Nach dem Produkthaftungsgesetz übernehmen wir die Haftung nur für das erstmalige Inverkehrbringen unserer Produkte.

6. Entsorgung

Die Entsorgung benutzter Produkte und Verpackungen muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen.

7. Maße und Wartung

Für Rohre mit 17 mm Außendurchmesser. Die Auflagefläche der Gummistopfen beträgt ca. 44 mm im Durchmesser.

Wir empfehlen: Lassen Sie Ihre Gehhilfe halbjährlich von Ihrem Fachhändler prüfen. Verschlissene Gummistopfen sind umgehend auszutauschen. Auf Durchmesser achten (bei 17 mm Außenrohr-Durchmesser, passt ein Gummistopfen mit 16 mm Innendurchmesser).

8. Zusammenbau- und Montagehinweise

Einen Austausch der Gummistopfen können Sie bei Bedarf vom Fachhandel durchführen lassen. Falls Sie selbst den Austausch des Gummistopfens vornehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor: Um einen Gummistopfen durch einen neuen zu ersetzen, ziehen Sie die Gummistopfen vom Ende des Rohres ab. Die neuen Gummistopfen müssen bis zum Anschlag aufgedrückt werden. Prüfen Sie dann den festen Sitz.