


**steets.**

**ABSTELLHILFE**  
**Gebrauchsanweisung und**  
**Montageanleitung**

**STEADY STAND**  
**Instruction manual**  
**and assembly guide**

**CE** **MD** **MADE IN GERMANY**

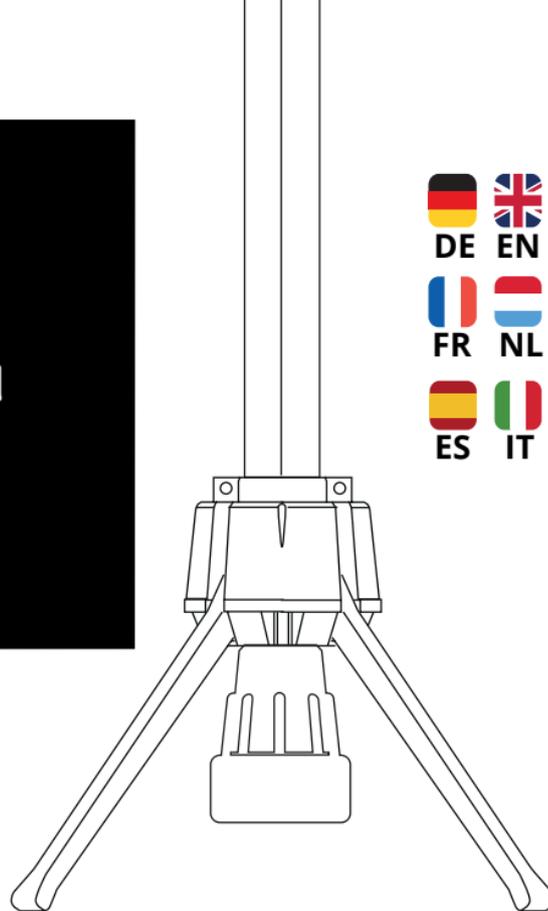

# Gebrauchsanweisung und Montageanleitung für die STEETS Abstellhilfe



Glückwunsch zu Ihrer STEETS Abstellhilfe – ein neuer Schritt zu mehr Leichtigkeit!

Um sicherzustellen, dass Ihre STEETS Abstellhilfe Ihnen im Alltag die beste Unterstützung bietet, lesen Sie bitte vor der Montage und der ersten Verwendung die Gebrauchsanweisung und Montageanleitung aufmerksam durch. Folgen Sie den detaillierten Schritten zur Montage und beachten Sie die Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung Ihrer STEETS Abstellhilfe zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Anweisung auch für einen späteren Gebrauch auf.

Bei Fragen, Problemen und für Hilfestellungen für die STEETS Abstellhilfe wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt erworben oder erhalten haben.



# Inhaltsverzeichnis

1.	KURZANLEITUNG ZUR MONTAGE DER STEETS ABSTELLHILFE .....	4
2.	HERSTELLER- UND PRODUKTINFORMATIONEN .....	6
3.	LIEFERUMFANG .....	7
4.	PRODUKTBESONDERHEITEN .....	7
5.	SICHERHEITSHINWEISE ZUM GEBRAUCH DER STEETS ABSTELLHILFE .....	8
6.	TECHNISCHE ANFORDERUNG FÜR DIE MONTAGE AN DER GEHSTÜTZE .....	10
7.	MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE STEETS ABSTELLHILFE AN DER GEHSTÜTZE .....	12
7.1	ERMITTLUNG DES ROHRDURCHMESSERS DER GEHSTÜTZE .....	13
7.2	EINSETZEN DER ADAPTERHÜLSEN .....	14
7.3	MONTAGE DES UNTEREN TEILSYSTEMS AN DER GEHSTÜTZE .....	15
7.4	MONTAGE DES OBEREN TEILSYSTEMS AN DER GEHSTÜTZE .....	16
8.	HÖHENEINSTELLUNG DER GEHSTÜTZE UND DES GRIFFS DER STEETS ABSTELLHILFE ...	18
9.	GEBRAUCH DER STEETS ABSTELLHILFE .....	19
10.	VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH .....	20
11.	LAGERUNG, PFLEGE UND WARTUNG .....	20
12.	VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNG .....	21
13.	NUTZUNGSDAUER UND WIEDEREINSATZ .....	21
14.	ENTSORGUNG .....	21
15.	MELDUNG VON VORFÄLLEN UND SICHERHEITSBEDENKEN .....	22

# 1. Kurzanleitung zur Montage der STEETS Abstellhilfe




qrco.de/bexSbv


Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet, um das Montagevideo für die STEETS Abstellhilfe aufzurufen.

1. Messen Sie mit der beiliegenden Schablone den Durchmesser des **unteren** und **oberen** Rohrs Ihrer Gehstütze. Vergleichen Sie Ihre Messungen mit der Abbildung, um zu bestimmen, ob Ihre Gehstütze eine der beiliegenden Adapterhülsen benötigt.

2. Setzen Sie die gegebenenfalls benötigten Adapterhülsen in das **untere** und **obere** Teilsystem der STEETS Abstellhilfe ein.

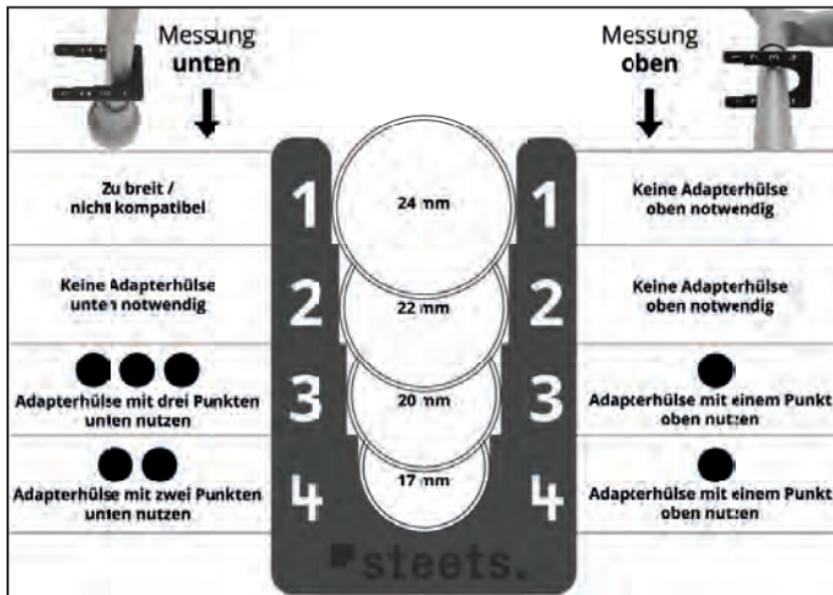

3. Entfernen Sie den Gummifuß von dem Rohr Ihrer Gehstütze **oder** ziehen Sie alternativ die beiden Rohre auseinander.

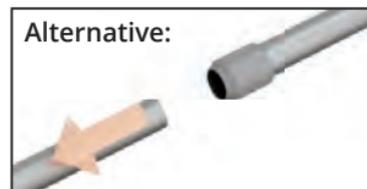

4. Schieben Sie das untere Teilsystem auf das untere Rohr der Gehstütze und klicken Sie das obere Teilsystem am oberen Rohrende fest. Anschließend platzieren Sie wieder den Gummifuß auf dem Rohr der Gehstütze **oder** stecken die Rohre zusammen. Verwenden Sie den Sechskantschlüssel, um die drei Schrauben anzuziehen und die STEETS Abstellhilfe am niedrigsten und höchsten Punkt des Gehstützenrohrs zu befestigen.



**Hinweis:** Überprüfen Sie, ob der Drehverschluss am Griff der STEETS Abstellhilfe geöffnet ist, denn nur so kann das obere Teilsystem nach oben gezogen werden.

5. Stellen Sie sicher, dass die Beine der STEETS Abstellhilfe **ausgeklappt** sind und der Drehverschluss **geöffnet** ist. Positionieren Sie den Griff der Abstellhilfe etwa eine Daumenbreite entfernt vom Griff der Gehstütze. Schließen Sie dann den Drehverschluss am Griff der Abstellhilfe.



## 2. Hersteller- und Produktinformationen



### Herstelleranschrift:

Steets GmbH  
Ausblick 1  
33100 Paderborn  
Deutschland

### Zweckbestimmung

Die ausklappbare STEETS Abstellhilfe erlaubt das Abstellen handelsüblicher Gehstützen direkt neben den Nutzer:innen, sodass die Hilfsmittel griffbereit sind, wenn Menschen spontan und kurzfristig auf sie zurückgreifen müssen. Diese Maßnahme ist eine wichtige Komponente der Sturzprävention und -prophylaxe. Gehhilfen werden in Bezug auf die Gewährleistung von Mobilität und Balance optimiert, wodurch die Sicherheit der Nutzer:innen unterstützt wird.

### Zielgruppe und Nutzungsbeschränkungen

Die STEETS Abstellhilfe wurde für Menschen entwickelt, die im Alltag auf Unterarmgehstützen/Krücken oder Gehstöcke angewiesen sind. Die Zielgruppe umfasst Nutzer:innen, die in ihrem täglichen Leben Wert auf mehr Leichtigkeit und eine sofortige Verfügbarkeit ihrer Gehstützen legen. Hinsichtlich der Nutzungsbeschränkungen ist die STEETS Abstellhilfe für den Gebrauch in Innenräumen und auf ebenen, trockenen Oberflächen konzipiert. Nutzer:innen sollten körperlich und geistig in der Lage sein, die STEETS Abstellhilfe sicher zu bedienen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Eignung des Produkts für den persönlichen Gebrauch wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen.

### 3. Lieferumfang

- 1x STEETS Abstellhilfe (A)
- 2x Adapterhülsen für das untere Teilsystem (B)
- 1x Adapterhülse für das obere Teilsystem (C)
- 1x Schablone (D)
- 1x Sechskantschlüssel (E)
- 1x Gebrauchsanweisung und Montageanleitung



### 4. Produktbesonderheiten

Die STEETS Abstellhilfe zeichnet sich durch eine Vielzahl von Besonderheiten aus:

- **Durchdachtes Design:** Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Fachärzt:innen, Therapeut:innen und Nutzer:innen für intuitive Handhabung.
- **Qualität aus Deutschland:** Produziert nach höchsten Standards für Medizinprodukte, mit besonderem Augenmerk auf Präzision und Qualität.
- **Intelligente Klappmechanik:** Automatisches Schließen bei Belastung für erhöhte Sicherheit.
- **Umweltschonend:** Hergestellt aus hochwertigem Recyclingmaterial, einschließlich umweltfreundlicher Verpackung und Anleitung.
- **Stufenlose Höhenverstellung:** Integrierter Drehverschluss am Griff ermöglicht optimale Anpassung.
- **Flexibel einsetzbar:** Passend für verschiedene Gehstützen durch mitgelieferte Adapterhülsen.


## 5. Sicherheitshinweise zum Gebrauch der STEETS Abstellhilfe

Bitte beachten Sie neben den folgenden Sicherheitshinweisen auch die Anweisungen und Vorgaben des Herstellers Ihrer Gehstütze. Sollten Unklarheiten oder Probleme auftreten, insbesondere solche, die im Zusammenhang mit der Nutzung der STEETS Abstellhilfe stehen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

- Die STEETS Abstellhilfe ist für Menschen ab einem Alter von 16 Jahren vorgesehen.
- Verwenden Sie die STEETS Abstellhilfe nur, wenn Sie sich in einem klaren Geisteszustand befinden, keine bewusstseinsverändernden Substanzen eingenommen haben und sich sowohl körperlich als auch geistig dazu in der Lage fühlen.
- Wenn Sie aufgrund einer Krankheit oder anderer Umstände unsicher sind, ob der Gebrauch der STEETS Abstellhilfe für Sie, Ihr Umfeld oder Ihre Mitmenschen geeignet ist, holen Sie sich vor dem Gebrauch ärztlichen Rat ein.
- Die STEETS Abstellhilfe ist lediglich zum Abstellen einer Gehstütze konzipiert und darf keinesfalls allein oder in Kombination mit der Gehstütze zweckentfremdet werden.
- Es ist untersagt, sowohl an der modifizierten Gehstütze als auch an der STEETS Abstellhilfe selbst Taschen, Beutel oder andere Gegenstände aufzuhängen.
- Die STEETS Abstellhilfe ist ausschließlich zum Abstellen der Gehstütze in Innenräumen und auf ebenen, sauberen Oberflächen ohne Schmutz oder Feuchtigkeit vorgesehen.
- Bitte beachten Sie, dass die gleichzeitige Belastung mehrerer ausgeklappter Beine der STEETS Abstellhilfe auf einem unebenen Untergrund dazu führen kann, dass sich das System im Boden verkeilt und nicht ordnungsgemäß einklappen kann. Dies könnte zu Stürzen oder Beschädigungen des Produkts führen. Verwenden Sie die STEETS Abstellhilfe daher ausschließlich auf ebenen Flächen und klappen Sie das System mit einer Belastung über die Gehstütze der hinteren zwei Beine der STEETS Abstellhilfe ein.





- Die Beine der STEETS Abstellhilfe sind ausschließlich zum Abstellen der Gehstütze vorgesehen. Jegliches Abstützen oder Fortbewegen im ausgeklappten Zustand ist untersagt.
- Beachten Sie, dass es nicht gestattet ist, sowohl am Griff der STEETS Abstellhilfe zu ziehen als auch gleichzeitig Druck auf die Beine der STEETS Abstellhilfe auszuüben.
- Bei unzureichenden Lichtverhältnissen ist besondere Vorsicht geboten, da abgestellte Gehstützen schlecht erkennbar sind und somit eine Stolpergefahr für Sie und Ihre Mitmenschen darstellen können.
- Bitte stellen Sie sicher, dass beim Ein- und Ausklappen der Beine sowie beim Abstellen der Gehstütze genügend Platz vorhanden ist, um ein Hängenbleiben oder Stolpern Ihrerseits oder anderer Personen zu vermeiden.
- Platzieren Sie die Gehstütze ausschließlich an geraden, sicheren und übersichtlichen Stellen, die nicht in Durchgängen oder hinter Türen liegen.
- Verwenden und bewahren Sie die STEETS Abstellhilfe ausschließlich außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Entfernen Sie die STEETS Abstellhilfe von Ihrer Gehstütze, falls Beschädigungen oder funktionale Beeinträchtigungen festgestellt werden.
- Die STEETS Abstellhilfe ist ausschließlich der Erstnutzung vorbehalten. Ein Wiedereinsatz, eine Weitergabe, Vermietung oder ein Verleih jeglicher Art sind untersagt.
- Vermeiden Sie beim Ein- und Ausklappen der STEETS Abstellhilfe ruckartige, kraftaufwendige oder belastende Bewegungen, die sich ggf. negativ auf Ihre Genesung oder das System der STEETS Abstellhilfe auswirken könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfkantigen Gegenstände wie Treppenstufen oder andere äußere Einflüsse wie Hitze, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Schmutz die STEETS Abstellhilfe, deren inneren Aufbau oder das Seil beschädigen.
- Verwenden Sie die STEETS Abstellhilfe nur in einem Temperaturbereich von -10 °C bis +35 °C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 40 % bis 85 %.

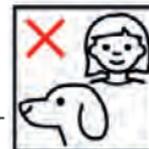

## 6. Technische Anforderung für die Montage an der Gehstütze

Vor der Montage der STEETS Abstellhilfe an Ihrer Gehstütze überprüfen Sie bitte die technische Anforderungstabelle, um die Kompatibilität mit Ihrer Gehstütze sicherzustellen. Alle aufgeführten Anforderungen müssen erfüllt sein, damit die Montage erfolgreich durchgeführt werden kann.

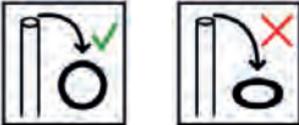Technische Anforderung	Kompatible Gehstütze	Abbildung
Form des Gehstützenrohrs	Das Gehstützenrohr muss zylindrisch bzw. kreisförmig sein, um eine ordnungsgemäße Befestigung der STEETS Abstellhilfe zu ermöglichen.	
Gewicht der Gehstütze	Das Gewicht einer einzelnen Gehstütze darf maximal bis zu 1,5 kg betragen.	
Durchmesser des Gehstützenrohrs	Das <b>untere</b> Rohr der Gehstütze muss einen Durchmesser zwischen 17 und 22 mm aufweisen.  Das <b>obere</b> Rohr muss einen Durchmesser zwischen 17 und 24 mm haben.  <b>Hinweis:</b> Bei Gehstützen mit einem durchgehenden bzw. einteiligen Rohr muss der Durchmesser zwischen 17 und 22 mm liegen.	

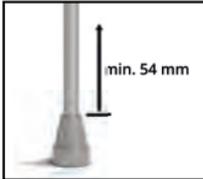Technische Anforderung	Kompatible Gehstütze	Abbildung
<p>Maximale Länge vom Gummifuß bis zur Unterkante des Griffs der Gehstütze</p>	<p>Gehstützen, die eine Länge von bis zu 980 mm vom Gummifuß bis zur Unterkante des Griffs aufweisen, sind kompatibel.</p>	
<p>Freier Platz oberhalb des Gummifußes</p>	<p>Für die Montage des unteren Teilsystems der STEETS Abstellhilfe müssen oberhalb des Gummifußes der Gehstütze mindestens 54 mm Platz auf dem Rohr vorhanden sein, um das untere Teilsystem montieren zu können.</p>	
<p>Größe des Gummifußes der Gehstütze</p>	<p>Der Gummifuß der Gehstütze darf bis zu 62 mm hoch sein.</p>	

## 7. Montageanleitung für die STEETS Abstellhilfe an der Gehstütze

Die Montage der STEETS Abstellhilfe an Ihrer Gehstütze ist ein einfacher Prozess, der innerhalb weniger Minuten sowohl von Nutzer:innen als auch vom Fachhandel durchgeführt werden kann. Bitte führen Sie jeden Schritt dennoch mit größter Sorgfalt aus, um die bestmögliche Funktionalität zu gewährleisten. Bewahren Sie den beiliegenden Sechskantschlüssel nach der Montage sicher auf, um die STEETS Abstellhilfe bei Bedarf leicht von Ihrer Gehstütze entfernen zu können.

Erleben Sie bereits bei der Montage Leichtigkeit:

Scannen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets den QR-Code, um eine Videoanleitung zur Montage Ihrer STEETS Abstellhilfe aufzurufen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung macht den Aufbau noch einfacher und bequemer, sodass Sie schnell die Vorteile Ihrer neuen STEETS Abstellhilfe genießen können.



qrco.de/bexSbv

### Sicherheitshinweise für die Montage:

- Die Montage der STEETS Abstellhilfe darf ausschließlich von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- Die Montage der STEETS Abstellhilfe ist nur an Gehstützen zulässig, die gemäß der technischen Anforderungstabelle kompatibel sind und keine Mängel oder Verunreinigungen aufweisen.
- Bei der Montage besteht die Gefahr, dass Körperteile durch das Einklappsystem der STEETS Abstellhilfe eingeklemmt werden können.
- Die Montage der STEETS Abstellhilfe muss so erfolgen, dass sie die Gehstütze nicht beschädigt, deren Funktionalität nicht beeinträchtigt und alle Sicherheitsvorgaben des Gehstützenherstellers beachtet.
- Die Montage sollte ausschließlich mit dem mitgelieferten Werkzeug durchgeführt werden.

**Hinweis:** Die Verwendung von elektrischen Geräten (bspw. Akkuschrauber) ist bei der Montage der STEETS Abstellhilfe verboten, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.




## 7.1 Ermittlung des Rohrdurchmessers der Gehstütze

1. Greifen Sie zu der beiliegenden Schablone (D) und messen Sie den Durchmesser des unteren und oberen Rohrs Ihrer Gehstütze.



2. Vergleichen Sie Ihre Messungen mit der Abbildung, um zu bestimmen, ob Ihre Gehstütze eine der beiliegenden Adapterhülsen benötigt. Legen Sie die entsprechenden Adapterhülsen für den nächsten Montageschritt zur Seite.

**Hinweis:** Sollte keine Adapterhülse für das untere und obere Ende Ihrer Gehstütze erforderlich sein, können Sie direkt mit Schritt 7.3 fortfahren: „Montage des unteren Teilsystems an der Gehstütze“.

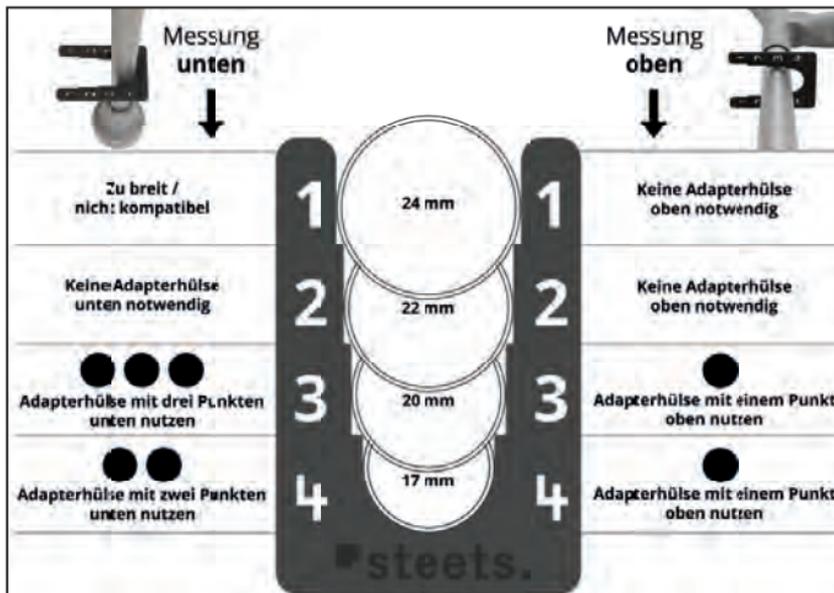

## 7.2 Einsetzen der Adapterhülsen


1. Klappen Sie vorsichtig mit beiden Händen die Beine der STEETS Abstellhilfe um. Achten Sie darauf, dass nach dem Umklappen keine Belastung auf das System einwirkt, um ein automatisches Umklappen zu verhindern.

2. Greifen Sie zu der Adapterhülse, die Ihre Gehstütze zunächst unten benötigt.

3. Setzen Sie die Adapterhülse in das untere Teilsystem der STEETS Abstellhilfe ein, indem Sie die Nase der Adapterhülse in die Führung stecken und nach unten drücken.



4. Greifen Sie nun zu der oberen Adapterhülse und setzen Sie diese in das obere Teilsystem der STEETS Abstellhilfe (Griffeinheit) ein, indem Sie die Nase der Adapterhülse in die Führung stecken und nach unten drücken.

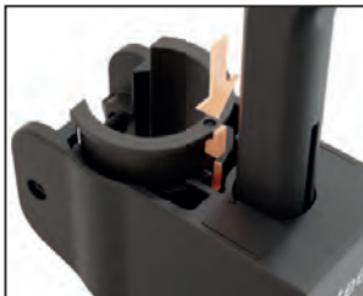

## 7.3 Montage des unteren Teilsystems an der Gehstütze

Nachdem die Adapterhülsen eingesetzt wurden, erfolgt nun die Montage der STEETS Abstellhilfe an der Gehstütze. Legen Sie dafür die Gehstütze auf eine ebene Fläche.

1. Entfernen Sie den Gummifuß von dem Rohr der Gehstütze oder ziehen Sie alternativ die beiden Rohre der Gehstütze auseinander.



2. Schieben Sie das untere Teilsystem der STEETS Abstellhilfe auf das untere Rohr Ihrer Gehstütze. Achten Sie darauf, es richtig herum aufzustecken.




**Hinweis:** Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an!

3. Setzen Sie nun wieder den Gummifuß auf das Rohr der Gehstütze oder stecken Sie die Rohre zusammen. Achten Sie beim Zusammenstecken der Rohre darauf, Ihre benötigte Höhe der Gehstütze einzustellen.

**Hinweis:** Gewährleisten Sie, dass der Gummifuß fest und sicher auf dem Rohr sitzt. Belasten Sie ggf. die Gehstütze mit Ihrem Körpergewicht, um das Rohr vollständig in den Gummifuß einzuführen.

4. Klappen Sie mit beiden Händen vorsichtig die Beine der STEETS Abstellhilfe aus.
5. Schieben Sie nun das untere System der STEETS Abstellhilfe bis an den Gummifuß der Gehstütze. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite mit dem STEETS-Schriftzug nach vorne zeigt.
6. Ziehen Sie nun mit dem Sechskantschlüssel (E) die beiden Schrauben handfest und gleichmäßig an, sodass sich das untere Teilsystem an der Gehstütze verklemt.

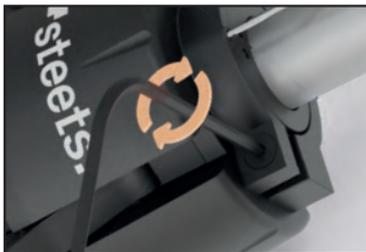

## 7.4 Montage des oberen Teilsystems an der Gehstütze

1. Entfernen Sie mit dem Sechskantschlüssel die Schraube auf der Rückseite des oberen Teilsystems (Griffeinheit) der STEETS Abstellhilfe.
2. Überprüfen Sie, ob der Drehverschluss am Griff der STEETS Abstellhilfe geöffnet ist, denn nur so kann das obere Teilsystem nach oben gezogen werden.



**Hinweis:** Falls der Drehverschluss geschlossen sein sollte, drehen Sie diesen wie auf dem Drehverschluss des Griffs abgebildet nach unten, bis Sie einen Anschlag spüren.

3. Ziehen Sie das obere Teilsystem nach oben und klicken Sie es an der höchsten Stelle auf das Rohr, unterhalb des Kunststoffes der Gehstütze.



4. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie diese mit dem Sechskantschlüssel handfest an, um das obere Teilsystem an der Gehstütze zu verklemmen. Achten Sie darauf, dass es gerade mit dem Griff der Gehstütze ausgerichtet ist.

5. Folgen Sie nun den Anweisungen in Punkt 8 auf der folgenden Seite, um den Griff der STEETS Abstellhilfe korrekt einzustellen und anschließend zu fixieren.

**Hinweis:** Schließen Sie noch nicht den Drehverschluss am Griff der STEETS Abstellhilfe!

## 8. Höheneinstellung der Gehstütze und des Griffs der STEETS Abstellhilfe

Zur Anpassung der Höhe der Gehstütze sowie des Griffs der STEETS Abstellhilfe folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drehverschluss am Griff der STEETS Abstellhilfe **geöffnet** ist. Um den Drehverschluss zu öffnen, drehen Sie ihn etwa 1 cm nach unten, wie auf der Abbildung des Drehverschlusses dargestellt, bis Sie einen Widerstand spüren.



2. Stellen Sie jetzt sicher, dass die Gehstütze passend auf Ihre Körpergröße eingestellt ist.

3. Klappen Sie nun mit beiden Händen die Beine der STEETS Abstellhilfe aus (stehender Zustand). Achten Sie darauf, die Beine der STEETS Abstellhilfe nicht zu belasten.

4. Platzieren Sie den Griff der STEETS Abstellhilfe etwa eine Daumenbreite entfernt vom Griff Ihrer Gehstütze und halten Sie ihn in dieser Position fest. Die Beine der STEETS Abstellhilfe müssen weiterhin ausgeklappt sein.

5. Nun befestigen Sie das Seil, indem Sie den Drehverschluss am Ende des Griffs vollständig zudrehen. Die STEETS Abstellhilfe ist nun einsatzbereit!



## 9. Gebrauch der STEETS Abstellhilfe

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ist die Handhabung der STEETS Abstellhilfe schnell erlernt. Dennoch wird empfohlen, anfänglich die Unterstützung einer anderen Person zu suchen und die Nutzung an einem standsicheren und ruhigen Ort zu üben.

1. Heben Sie die Gehstütze an, sodass sie sich mindestens 20 cm über dem Boden befindet.
2. Ziehen Sie am Griff der STEETS Abstellhilfe, sodass die Beine ausklappen und einrasten.

**Hinweis:** Wenn der Griff nicht ausreichend nach oben gezogen werden kann oder nicht weit genug zurückfahren kann, müssen Sie diesen mithilfe des Drehverschlusses neu justieren (siehe Abschnitt 8: „Höheneinstellung der Gehstütze und des Griffs der STEETS Abstellhilfe“).

3. Nachdem die Beine der STEETS Abstellhilfe ausgeklappt sind, können Sie nun die Gehstütze behutsam auf einer sauberen und ebenen Fläche abstellen. Vermeiden Sie nach dem Abstellen einen ungewollten Kontakt, um ein Umkippen der Gehstütze zu verhindern.

4. Um die Beine der STEETS Abstellhilfe einzuklappen, belasten Sie zwei Beine der STEETS Abstellhilfe. Dazu halten Sie die Gehstütze schräg und drücken diese nach unten. Achten Sie darauf, den Griff beim Einklappen nicht zu umgreifen.



## 10. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Durch das häufige Ziehen des Griffs der STEETS Abstellhilfe kann es zu ungewohnten Belastungen an der Hand oder am Unterarm kommen. Gewöhnen Sie sich langsam und behutsam an die Nutzung.
- Trotz des geringen Gewichts der STEETS Abstellhilfe kann das Gehen mit ihr zu einer vorzeitigen Ermüdung Ihres Körpers führen. Machen Sie daher regelmäßig Pausen.
- Durch die Abstellfunktion der Gehstütze besteht die Gefahr, dass Sie oder andere Personen über die Gehstütze oder die Beine des Systems stolpern. Vermeiden Sie Unfälle, indem Sie die STEETS Abstellhilfe aufmerksam nutzen und die Gehstütze ausschließlich an sicheren, übersichtlichen Orten abstellen.
- Beachten Sie, dass durch die Nutzung der STEETS Abstellhilfe sowohl auf Böden als auch an der Gehstütze selbst Gebrauchsspuren entstehen können. Darüber hinaus besteht auf unebenen oder schrägen Böden sowie bei Berührungen oder äußeren Einflüssen wie Wind die Gefahr, dass die Gehstütze umfällt und Schäden verursacht. Achten Sie daher beim Abstellen stets auf den geeigneten Untergrund und Ihre Umgebung.
- Bitte achten Sie darauf, sich beim Fortbewegen und Überqueren von Hindernissen wie Treppenstufen ausschließlich mit dem Gummifuß Ihrer Gehstütze abzustützen. Halten Sie mit dem unteren Teilsystem der STEETS Abstellhilfe ausreichend Abstand zu Kanten oder Ecken, um nur den Gummifuß der Gehstütze zu belasten und mögliche Stürze oder Beschädigungen der STEETS Abstellhilfe zu vermeiden.

## 11. Lagerung, Pflege und Wartung

- Die STEETS Abstellhilfe benötigt keine Wartung.
- Lagern Sie die STEETS Abstellhilfe nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen sowie während des Sommers im Fahrzeug oder an feuchten Orten. Lagern Sie die STEETS Abstellhilfe stattdessen bei normaler Zimmertemperatur.

- Vermeiden Sie starke oder langfristige Sonneneinstrahlung, da Sonne und Hitze den Kunststoff und innenliegende Bauteile verformen und beschädigen können.
- Bei äußerlichen Verschmutzungen können Sie die STEETS Abstellhilfe vorsichtig mit einem weichen Lappen und lauwarmem Wasser säubern. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger, da diese den Kunststoff beschädigen können.
- Zur Desinfektion verwenden Sie bitte ausschließlich ein Desinfektionsmittel, das für Kunststoffe geeignet ist und diese nicht angreift.

## **12. Verwendungseinschränkung**

Im Falle einer Beschädigung, Verformung oder Funktionsstörung der STEETS Abstellhilfe ist ein weiterer Gebrauch untersagt. Bitte entfernen Sie in diesem Fall die STEETS Abstellhilfe unverzüglich von Ihrer Gehstütze.

## **13. Nutzungsdauer und Wiedereinsatz**

Die STEETS Abstellhilfe ist ausschließlich für die Erstnutzung vorgesehen. Ein Wiedereinsatz, eine Weitergabe, Vermietung oder ein Verleih jeglicher Art sind untersagt und bedürfen u. a. einer Qualitäts- und Sicherheitsprüfung durch die Steets GmbH.

## **14. Entsorgung**

Die STEETS Abstellhilfe kann über die gelbe Tonne entsorgt werden. Da sich die örtlichen Entsorgungsvorschriften je nach Land und Zeit jedoch ändern können, bitte wir Sie, für eine korrekte Entsorgung gemäß den lokalen Bestimmungen sich an Ihren Fachhändler zu wenden. Alternativ können Sie die STEETS Abstellhilfe auch zum Recycling an die Herstelleradresse senden.

## 15. Meldung von Vorfällen und Sicherheitsbedenken

Für die Meldung schwerwiegender Vorfälle, insbesondere solcher, die zum Tod oder zu schwerwiegenden Verschlechterungen des Gesundheitszustands von Menschen geführt haben oder hätten führen können, kontaktieren Sie bitte unverzüglich den Hersteller (Steets GmbH) über die Herstelleranschrift oder die Webseite ([www.steets-lab.com](http://www.steets-lab.com)). Gleichzeitig ist es wichtig, dass Sie die nationale Aufsichtsbehörde über den Vorfall informieren. Das Meldeformular ist an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Abteilung 9, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn (Telefax: 0228 207-5300) zu richten.

■ **steets.**