



Volkmann-Schiene (Metalllagerungsschienen)



Volkmann-Schiene Finn für Erwachsene, starr
Artikelnummer-ID: 11125007;182
Merkmal: 75 cm lang

Medizinprodukt der Klasse 1 **CE**

1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Volkmann-Schiene kann bei Beinverletzungen zum Stützen, Ruhigstellen und Lagern eingesetzt werden, vornehmlich zum Flachlagern.
- Mit dem beigefügten T-Stück kann auch eine minimale Schräg-Lagerung erfolgen.
- Bevor das verletzte Bein in die Schiene gelegt wird, sollte die Verletzung mit einem Verband abgedeckt werden.
- Röntgenfähige Schiene: Die Volkmann-Schiene wird aus Aluminium hergestellt und ist pulverbeschichtet.

Als Zusatzprodukte erhältlich:
Polster zu Volkmannschiene
Artikelnummer-ID: 11125007;182
Merkmal: 75 cm lang



Die Polster können bei 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden, sind aber nicht für Trockner geeignet.

2. Sicherheitshinweise:

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Die kunststoffbeschichtete Aluminiumschiene darf nie direkten Kontakt zu nackter Haut und zu offenen Wunden haben.
- Es ist empfehlenswert das zu schienende Bein mit einem einfachen Verband zu versorgen.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Bei gleichzeitige Nutzung anderer Produkte Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Das Produkt steht für Mehrfachnutzung. Es kann einfach gereinigt und desinfiziert werden.
- Die Volkmann-Schiene, sowie deren Polsterung sind regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu prüfen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung der Volkmann-Schiene kann mit milden, ph-neutralen, krankenhauses- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln vorgenommen werden. Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten) achten.

5. Entsorgung:

Die Aluminiumschiene wird über den Hausmüll / Restmüll entsorgt.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de