



Beinhochlagerungskeil (Schaumstofflagerungsschienen)



Beinhochlagerungskeil Ben

Artikelnummer-ID: 11340200;250
Merkmal: Gr.1 72x22x20 cm

Artikelnummer-ID: 11340200;263
Merkmal: Gr.2 60x22x18 cm

Beinhochlagerungskeil Ben

Artikelnummer-ID: 11340200;238
Merkmal: für 2 Beine Gr.1 72x44x20 cm

Artikelnummer-ID: 11340200;237
Merkmal: für 2 Beine Gr.2 60x44x18 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Der Beinhochlagerungskeil wird zur Nachtlagerung verwendet und eignet sich zur Lagerung für das Intervalltraining bei Patienten mit primären und sekundären Beinlymphödemen, mit idiopathischen und orthostatischen Ödemen, mit Phlebödemen und Lipödemen.
- Einsatzmöglichkeiten: Krankenhaus, Reha, Physiotherapie, häuslichen Pflege.
- Der Lagerungskeil besteht aus einem Schaumkörper bezogen mit einem Kunstlederbezug mit Reißverschluss.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen und desinfizieren.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Grobe Verunreinigungen können mit einem Gemisch aus milden, neutralen haushaltsüblichen Reinigern und Wasser mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

Anschließend kann das Produkt mit milden handelsüblichen Desinfektionsmittel oder Desinfektionstüchern desinfiziert werden.

Duftstoffe und Rückfettungsmittel sind als Inhaltstoffe ungeeignet; sie könnten zu Trübungen und Streifen an der Oberfläche des Keils führen. Der regelmäßige Einsatz von alkohol- bzw. lösemittelhaltigen Erzeugnissen kann zu negativen Beeinflussungen der Oberflächen sowie einer langfristige Material Versprödung führen.

Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistung auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit ablehnen.

Der Schaumkörper in der Kunstlederhülle kann nicht gereinigt werden.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de