

Gebrauchsanweisung



dr. paul koch
GESUNDHEITSPRODUKTE

Fußstütze für 2 Beine (Schaumstofflagerungsschienen)



Fußstütze Oliver für 2 Beine

Artikelnummer-ID: 11340800;256

Merkmal: Gr.1, 60x35x20 cm

Artikelnummer-ID: 11340800;270

Merkmal: Gr.2, 60x35x15 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Als Bettverkürzter zur Vermeidung von Spitzfußbildung. Eine individuelle Abstützung lässt sich durch die Kombination verschiedener Größen erreichen.
- Einsatzmöglichkeiten: Krankenhaus, Reha, Physiotherapie, häuslichen Pflege.
- Die Fußstütze besteht aus einem Schaumkörper bezogen mit einem Kunstlederbezug mit Reißverschluss.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen und desinfizieren.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.

- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Grobe Verunreinigungen können mit einem Gemisch aus milden, neutralen haushaltsüblichen Reinigern und Wasser mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Duftstoffe und Rückfettungsmittel sind als Inhaltsstoffe ungeeignet; sie könnten zu Trübungen und Streifen an der Oberfläche der Halbrolle führen.

Anschließend kann das Produkt mit milden handelsüblichen Desinfektionsmittel oder Desinfektionstüchern desinfiziert werden.

Der regelmäßige Einsatz von alkohol- bzw. lösemittelhaltigen Erzeugnissen kann zu negativen Beeinflussungen der Oberflächen sowie einer langfristige Material Versprödung führen.

Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistung auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit ablehnen.

Der Schaumkörper in der Kunstlederhülle kann nicht gereinigt werden.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de