



Halbrolle

(Schaumstofflagerungsschienen)



Halbrolle Ron Gr.1, 40x22x11 cm

Artikelnummer-ID: 11341300;382

Merkmal: weiß

Artikelnummer-ID: 11341300;347

Merkmal: rot

Artikelnummer-ID: 11341300;217

Merkmal: dunkelblau

Artikelnummer-ID: 11341300;360

Merkmal: schwarz

Artikelnummer-ID: 11341300;375

Merkmal: türkis

Artikelnummer-ID: 11341300;202

Merkmal: apfelgrün

Halbrolle Sven Gr.2, 40x15x7,5 cm

Artikelnummer-ID: 11341301;382

Merkmal: weiß

Artikelnummer-ID: 11341301;347

Merkmal: rot

Artikelnummer-ID: 11341301;217

Merkmal: dunkelblau

Artikelnummer-ID: 11341301;360

Merkmal: schwarz

Artikelnummer-ID: 11341301;375

Merkmal: türkis

Artikelnummer-ID: 11341301;202

Merkmal: apfelgrün

Medizinprodukt der Klasse 1 

1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Halbrollen finden als Lagerungshilfen vielseitigen Einsatz zum Lagern und Stützen des Körpers, als auch als Therapiehilfe um den Patienten in die optimale Position zu bringen.
- Einsatzmöglichkeiten: Krankenhaus, Reha, Physiotherapie, häuslichen Pflege.
- Die Halbrollen bestehen aus einem halbrunden Schaumkörper bezogen mit einem Kunstlederbezug mit Reißverschluss.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen und desinfizieren.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehenes Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Grobe Verunreinigungen können mit einem Gemisch aus milden, neutralen haushaltsüblichen Reinigern und Wasser mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Duftstoffe und Rückfettungsmittel sind als Inhaltsstoffe ungeeignet; sie könnten zu Trübungen und Streifen an der Oberfläche der Halbrolle führen.

Anschließend kann das Produkt mit milden handelsüblichen Desinfektionsmittel oder Desinfektionstüchern desinfiziert werden.

Der regelmäßige Einsatz von alkohol- bzw. lösemittelhaltigen Erzeugnissen kann zu negativen Beeinflussungen der Oberflächen sowie einer langfristigen Material Versprödung führen.

Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistung auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit ablehnen.

Der Schaumkörper in der Kunstlederhülle kann nicht gereinigt werden.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de