

# Gebrauchsanweisung



dr. paul koch  
GESUNDHEITSPRODUKTE

## Nacken- und Knierolle (Schaumstofflagerungsschienen)



<b>Nacken- und Knierolle Luca</b> <b>40x30 cm</b> Artikelnummer-ID: 11341803;347 Merkmal: rot	<b>Nacken- und Knierolle Timo</b> <b>50x15 cm</b> Artikelnummer-ID: 11341813;347 Merkmal: rot	<b>Nacken- und Knierolle Milan</b> <b>65x15 cm</b> Artikelnummer-ID: 11341827;347 Merkmal: rot
Artikelnummer-ID: 11341803;356 Merkmal: schokoladenbraun	Artikelnummer-ID: 11341813;217 Merkmal: dunkelblau	Artikelnummer-ID: 11341827;217 Merkmal: dunkelblau
Artikelnummer-ID: 11341803;332 Merkmal: oliv	Artikelnummer-ID: 11341813;360 Merkmal: schwarz	Artikelnummer-ID: 11341827;360 Merkmal: schwarz
Artikelnummer-ID: 11341803;217 Merkmal: dunkelblau	Artikelnummer-ID: 11341813;375 Merkmal: türkis	Artikelnummer-ID: 11341827;375 Merkmal: türkis
Artikelnummer-ID: 11341803;360 Merkmal: schwarz	Artikelnummer-ID: 11341813;381 Merkmal: weiß	Artikelnummer-ID: 11341827;381 Merkmal: weiß
Artikelnummer-ID: 11341803;375 Merkmal: türkis	Artikelnummer-ID: 1134113;202 Merkmal: apfelgrün	
Artikelnummer-ID: 11341803;381 Merkmal: weiß		
Artikelnummer-ID: 11341803;202 Merkmal: apfelgrün		

Medizinprodukt der Klasse 1



## 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR
- Die Nacken- und Knierollen dienen zur Therapie und allgemeinen Lagerung, sowie zu unterstützenden Lagerung der Kniegelenke und des Nackens. Als Therapiehilfe um den Patienten in die optimale Position zu bringen.
- Einsatzmöglichkeiten: Krankenhaus, Reha, Physiotherapie, häuslichen Pflege.
- Die Nacken- und Knierolle bestehen aus einem runden Schaumkörper bezogen mit einem Kunstlederbezug mit Reißverschluss.

## 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen und desinfizieren.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden ([info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)).

## 3. Reinigung und Desinfektion:

Grobe Verunreinigungen können mit einem Gemisch aus milden, neutralen haushaltsüblichen Reinigern und Wasser mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Duftstoffe und Rückfettungsmittel sind als Inhaltstoffe ungeeignet; sie könnten zu Trübungen und Streifen an der Oberfläche der Halbrohle führen.

Anschließend kann das Produkt mit milden handelsüblichen Desinfektionsmittel oder Desinfektionstüchern desinfiziert werden.

Der regelmäßige Einsatz von alkohol- bzw. lösemittelhaltigen Erzeugnissen kann zu negativen Beeinflussungen der Oberflächen sowie einer langfristige Material Versprödung führen.

Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistung auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit ablehnen.

Der Schaumkörper in der Kunstlederhülle kann nicht gereinigt werden.

## 4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

## 5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
[www.dr-koch.de](http://www.dr-koch.de), [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)