



Röntgen-Fixierkeile und Polster (Schaumstofflagerungsschienen)



Röntgen-Fixierkeil, blank

Artikelnummer-ID: 11345001;359 (Clara)
Merkmal: Keil, 24x18x6 cm

Artikelnummer-ID: 11345001;418 (Mark)
Merkmal: Keil, 25x20x7 cm

Röntgen-Fixierkeil, PU-beschichtet

Artikelnummer-ID: 11345024;357 (Clara)
Merkmal: Keil, 24x18x6 cm

Artikelnummer-ID: 11345024;418 (Mark)
Merkmal: Keil, 25x20x7 cm



Röntgen-Fixierkeil, blank

Artikelnummer-ID: 11345001;87 (Delia)
Merkmal: Keil, 20x25x11 cm

Artikelnummer-ID: 11345001;83 (Björn)
Merkmal: Keil, 20x12x6 cm

Röntgen-Fixierkeil, PU-beschichtet

Artikelnummer-ID: 11345024;87 (Delia)
Merkmal: Keil, 20x25x11 cm

Artikelnummer-ID: 11345024;83 (Björn)
Merkmal: Keil, 20x12x6 cm



Röntgen-Fixierkeil, blank

Artikelnummer-ID: 11345001;303 (Patrick)
Merkmal: Keil groß, 24x36x11 cm

Artikelnummer-ID: 11345001;326 (Celina)
Merkmal: Keil mittel, 24x18x11 cm

Artikelnummer-ID: 11345001;312 (Jens)
Merkmal: Keil klein, 18x10x5 cm



Röntgen-Fixierhilfe rechteckig, blank

Artikelnummer-ID: 11345001;344 (Linus)
Merkmal: rechteckig, 24x18x3 cm


Artikelnummer-ID: 11345001;345 (Diana)
Merkmal: rechteckig, 24x18x5 cm

Artikelnummer-ID: 11345001;417 (Joris)
Merkmal: rechteckig, 25x20x7 cm

Röntgen-Fixierkeile, PU-beschichtet
Artikelnummer-ID: 11345024;301 (Patrick)
Merkmal: Keil groß, 24x36x11 cm

Artikelnummer-ID: 11345024;324 (Celina)
Merkmal: Keil mittel, 24x18x11 cm

Artikelnummer-ID: 11345024;310 (Jens)
Merkmal: Keil klein; 18x10x5 cm

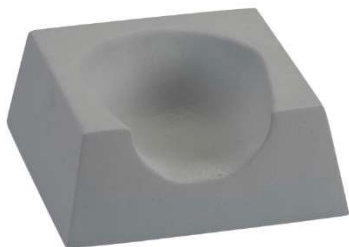

Röntgen-Fixierhilfe rechteckig, PU-beschichtet
Artikelnummer-ID: 11345024;341 (Linus)
Merkmal: rechteckig, 24x18x3 cm

Artikelnummer-ID: 11345024;342 (Diana)
Merkmal: rechteckig, 24x18x5 cm

Artikelnummer-ID: 11345024;417 (Joris)
Merkmal: rechteckig, 25x20x7 cm



Fixier-Kopfteil Mario Rückenlage
Artikelnummer-ID: 11345016;350
Merkmal: Rückenlage, PU-beschichtet

Artikelnummer-ID: 11345016;416
Merkmal: Rückenlage, blank



Fixier-Kopfteil Mario Bauchlage
Artikelnummer-ID: 11345016;206
Merkmal: Bauchlage, PU-beschichtet

Fixier-Rolle Dennis, 25x10 cm
Artikelnummer-ID: 11345015;340
Merkmal: PU-beschichtet

Artikelnummer-ID: 11345015;419
Merkmal: Blank



Als Zusatzprodukt erhältlich:

Röntgen-Schaumkeil-Sortiment 9-teilig
Artikelnummer-ID: 11346000;0
Merkmal: Blank

Artikelnummer-ID: 11346001;0
Merkmal: PU-beschichtet

beinhaltet:
2x Keil 24x18x6 cm
2x Keil klein 18x10x5 cm
2x Keil mittel 24x18x11cm
1xFixierhilfe rechteckig 24x18x5 cm
1xFixierhilfe rechteckig 24x18x3 cm
1x Keil groß 24x36x11cm



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Röntgen-Fixierkeile und Polster werden in der Röntgendiagnostik und in der Röntgentherapie verwendet. Sie dienen zum Fixieren des Patienten, da sie eine optimale strahlendurchlässige Unterlage bieten.
- Die Röntgenfixierkeile werden in den Varianten geliefert:
 - Blank = einfacher, grauer Schaumstoff und
 - PU-beschichtet = grauer Schaumstoff mit PU-Beschichtung
- PU-Verhautung wird angewandt um, Polyurethan-Weichschaum zu veredeln. Es handelt sich bei der Beschichtung meist um ein Gemisch aus Klebstoffen zur Dispersion und lösungsmittelhaltigen Gemischen.
- Durch eine PU-Verhautung ist der Schaumstoff vor äußeren Einflüssen besser geschützt, wodurch alternative Einsatzgebiete für dieses Material entstehen. Darüber hinaus wird das Material widerstandfähiger gegen Verschmutzung und Deformierung durch Einrisse oder Ähnliches.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Nach Nutzung des Produkts bitte reinigen und desinfizieren.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Sollte das Produkt erhebliche Gebrauchs- und Verschleißerscheinungen zeigen, sollte es ersetzt werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Einfacher **blanker** Schaumstoff kann nicht mit herkömmlichen Reinigungsverfahren gereinigt werden. Bei diesem offenen Schaumstoff ist es ratsam bei jeder Anwendung ein Ärztekrepp unterzulegen.

PU-beschichteter Schaumstoff kann mit milden, ph-neutralen krankenhaushaus- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

Nach dem Auftragen des Desinfektionsmittels auf die Lagerungshilfe ist diese gleich trockenzureiben.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de