


Gebrauchsanweisung



dr. paul koch
GESUNDHEITSPRODUKTE

Beinhochlagerungsschiene nach Braun u. Schulze (Schaumstofflagerungsschienen)

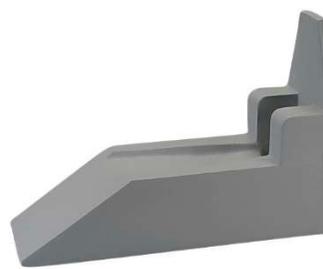

Beinhochlagerungsschiene für Erwachsene mit PVC-Sohle Hans

Artikelnummer-ID: 11533800;258
Merkmal: Gr.1 75x25 cm, 30°

Artikelnummer-ID: 11533800;252
Merkmal: Gr.1 75x25 cm, 30°, PU-beschichtet

Artikelnummer-ID: 11533800;251
Merkmal: Gr.1 75x25 cm, 30°, atmungsaktiv

Beinhochlagerungsschiene für Kinder mit PVC-Sohle Holger

Artikelnummer-ID: 11533801;273
Merkmal: Gr.2 55x20 cm, 30°


Artikelnummer-ID: 11533801;264
Merkmal: Gr.2 55x20 cm, 30°, PU-beschichtet

Medizinprodukt der Klasse 1




1. Allgemeine Angaben

Grundnummer 11533800 (75x25 cm, 30°) – Hans Schiene

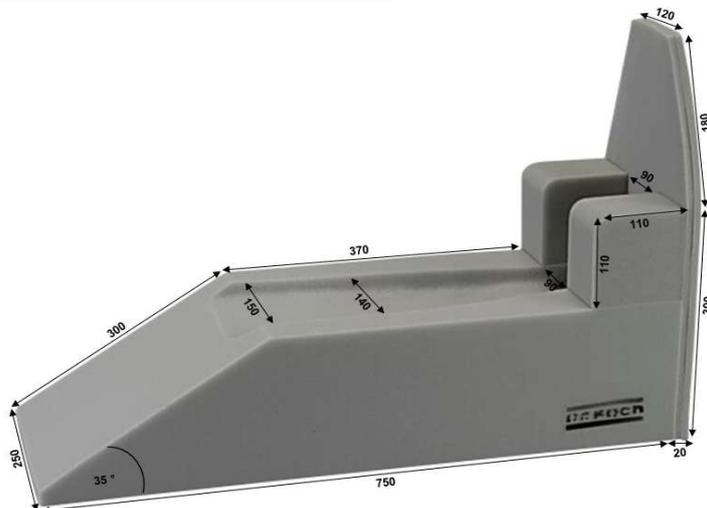

Grundnummer 11533801 (55x20 cm, 30°) – Holger Schiene

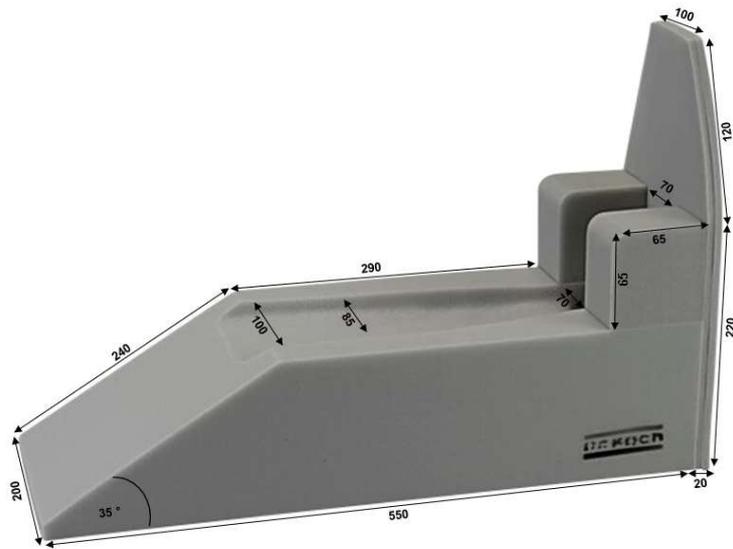

Als Zusatzprodukt erhältlich:

Die Bezüge aus Kunstleder oder Trikotstoff sind für eine hygienische Handhabung empfohlen. Vor allem in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen wird der Kunstlederbezug gewählt. Er schützt das Eindringen von Feuchtigkeit in die offenporige Schaumstoffschiene und lässt sich gut reinigen und desinfizieren.



Trikotbezug, weiß

Artikelnummer-ID: 11533802;249

Merkmal: Gr.1 zu den Hans Schienen

Kunstlederbezug, weiß

Artikelnummer-ID: 11533804;382

Merkmal: zu den Hans Schienen

Komfortbezug, weiß

Artikelnummer-ID: 11538100;397

Merkmal: zu den Hans Schienen

Artikelnummer-ID: 11533802;262

Merkmal: Gr.2 zu den Holger Schienen

2. Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Diese Schaumstoffschienen (nach Braun, Schulze) dienen zur Hochlagerung des Beines bei Knochenbrüchen, Verrenkungen, Quetschungen, Erste-Hilfe-Versorgung und kurzfristigen Behandlungen sowie Venenentzündungen und Thrombosen.
- Die Form der Schiene ist nach orthopädischen Vorgaben angepasst und garantiert eine angenehme Lagerung des Beins.
- Das feste Fußende (mit Kunststoffplatte verstärkt) mindert die Gefahr der Spitzfußbildung.
- **Indikation:** Ruhigstellen und Abschwellen von distalem Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß nach Verletzungen, Frakturen und Osteosynthese.

- PU-Verhautung wird angewandt um, Polyurethan-Weichschaum zu veredeln. Es handelt sich bei der Beschichtung meist um ein Gemisch aus Klebstoffen zur Dispersion und lösungsmittelhaltigen Gemischen.
- Durch eine PU-Verhautung ist der Schaumstoff vor äußeren Einflüssen besser geschützt, wodurch alternative Einsatzgebiete für dieses Material entstehen. Darüber hinaus wird das Material widerstandfähiger gegen Verschmutzung und Deformierung durch Einrisse oder Ähnliches.

3. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Diese Produkte sind nur für die in dieser Gebrauchsanweisung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung kann unerkannte Gefahren in sich bergen und ist zu unterlassen.
- Vorsicht bei unruhigen Patienten: Durch Hypermotorik könnte das Bein zu oft aus der Schienen genommen werden und zu verstärkten Schmerzen führen.
- Nicht anwendbar bei Verletzungen und Erkrankungen, die eine Flachlagerung oder eine andere Form der Lagerung des Beins erfordern.
- Offene und entzündliche Wunden stets mit einem Verband versehen, bevor das Bein in eine Schaumstoffschiene gelegt wird.
- Direkten Hautkontakt vermeiden: Die reine Schaumstoffschiene vor Benutzung immer mit einem Bezug beziehen oder mit einem Handtuch oder ähnlichem bedecken.
- Die Produkte sind regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu untersuchen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Der Hersteller, ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Gebrauchsanweisung in allen Punkten befolgt wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Komponenten verwendet werden.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

4. Materialbeschaffenheit, Reinigung und Desinfektion:

Die Beinlagerungsschienen sind aus Polyurethan-(PUR-)Weichschaumstoff hergestellt.

PUR-Weichschaumstoffe sind flexible, offenporige Schaumstoffe, die bei Auslieferung folgende Eigenschaften haben:

- Sie haben einen spezifischen Eigengeruch, der bereits nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmbar ist.
- PUR-Weichschaumstoffe neigen dazu, bei Lichteinwirkung an der Oberfläche zu vergilben.
- PUR-Schaumstoff ist nach heutigem Stand der Erkenntnisse physiologisch unbedenklich. Allgemein löst PUR-Weichschaumstoff keine allergischen Hautreaktionen aus.

Reinigung und Desinfektion:

- Da die Schaumstoffprodukte offenporig sind, sind sie vor verunreinigenden Flüssigkeiten zu schützen. Sie haben die Möglichkeit diese Schaumstoffprodukte vor Gebrauch mit einem Bezug zu beziehen oder mit einem Handtuch zu bedecken/auszulegen.
- Beim Abziehen eines Bezugs sorgfältig gearbeitet werden, um ein Einreißen des PUR-Schaumkörpers zu vermeiden.
- Der blanke Schaumkörper sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das blanke, offenporige Schaumstoffprodukt kann nicht desinfiziert werden.

5. **Wartung und Pflege:**

Die Schaumstoffschiene soll Temperaturen von über 65 °C nicht auf längere Zeit ausgesetzt werden.

Vor jedem Neueinsatz sollte die Schaumstoffschiene auf Unversehrtheit des Materials kontrolliert werden. Bei Schäden an der Oberfläche oder porösem Schaumstoff ist sie zu ersetzen.

6. **Entsorgung**

Die Entsorgung der Schaumstoffschienen kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de