



## OP-Gurte (Fixierungshilfen)



**OP-Gurt Kaja aus Leder mit Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175000;74  
Merkmal: 190x6 cm

**OP-Gurt Kaja aus Leder mit Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175000;94  
Merkmal: 250x6 cm

**OP-Gurt Juna aus Chemotex mit Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175200;74  
Merkmal: 190x6 cm

**OP-Gurt Juna aus Chemotex mit Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175200;94  
Merkmal: 250x6 cm



**OP-Gurt Jenny aus Leder ohne Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175002;74  
Merkmal: 190x6 cm

**OP-Gurt Jenny aus Leder ohne Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175002;94  
Merkmal: 250x6 cm

**OP-Gurt Rina aus Chemotex ohne Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175202;74  
Merkmal: 190x6 cm

**OP-Gurt Rina aus Chemotex ohne Polster**  
Artikelnummer-ID: 12175202;94  
Merkmal: 250x6 cm



**OP-Gurt Paul, metallfrei, Chemotex mit Polster und Klettverschluss**  
Artikelnummer-ID: 12175204;75  
Merkmal: 190x7 cm

**OP-Gurt Paul, metallfrei, Chemotex mit Polster und Klettverschluss**  
Artikelnummer-ID: 12175204;95  
Merkmal: 250x7 cm

### 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die OP-Gurte sind Fixierungshilfen um Patienten sicher auf dem OP-Tisch oder auf der Krankentrage zu halten.
- Die Gurte sind erhältlich aus Leder oder Kunstleder, Chemotex, mit Dornschnelle.
- Wahlweise sind die OP-Gurte mit auswechselbarem Polster oder metallfrei zu erhalten.
- Bevor der OP-Gurt angelegt wird, sollte der Patient über das Vorgehen informiert und beruhigt werden.

### 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der OP-Gurte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Achtung: nie auf offene Wunden oder Verletzungen anbringen.
- Die Fixierungshilfen dürfen nur von Fachpersonal angelegt werden.
- Solange der Patient mit dem OP-Gurt fixiert ist, darf er nicht unbeobachtet sein. Regelmäßig sollte seine Atmung und seine Konstitution geprüft werden.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Die Verwendung einer Polsterung hilft eventuelle Druckstellen zu vermeiden.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des OP-Gurts während der Anwendung.
- Der OP-Gurt ist regelmäßig, vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen, Einrisse) zu prüfen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

### 3. Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung der OP-Gurte (Leder, Chemotex und Kunstleder) kann mit milden, ph-neutralen krankenhaushaushaltsüblichen Reinigungsmitteln vorgenommen werden. Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

#### **4. Wartung und Pflege:**

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten) achten.

#### **5. Entsorgung**

Die OP-Gurte und das Polster können über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
www.dr-koch.de, [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)