



SICHERHEITSHINWEISE:



Lesen Sie bitte vor der Anwendung die Sicherheitshinweise und bewahren Sie den Beipackzettel auf



Das OP-FIX-Band darf nur von medizinischem Fachpersonal angewendet werden



Das OP-FIX-Band darf nur für die **Fixierung** von Patienten **an Armen und Beinen** angewendet werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass das OP-FIX-Band nicht zu eng angelegt wird, damit die **Blutzirkulation nicht beeinträchtigt** wird. Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des OP-FIX-Bandes. Prüfen Sie, ob das OP-FIX-Band an einem geeigneten Gegenstand fixiert ist. Nicht auf offenen Wunden anbringen
Maximale Zugbelastung 1.000 N

Reinigungshinweise:



Band vor dem Waschen unbedingt schließen
Waschen mit 40°C Maximaltemperatur
Trommeltrocknung mit reduzierter thermischer Belastung