






Fix-Verbandschienen (Schaumstofflagerungsschienen)



Fix-Verbandschiene Anton

Artikelnummer-ID: 12470000;69 Merkmal: 15x3 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;154 Merkmal: 50x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;181 Merkmal: 70x9 cm
Artikelnummer-ID: 12470000;88 Merkmal: 20x3 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;167 Merkmal: 60x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;195 Merkmal: 80x9 cm
Artikelnummer-ID: 12470000;98 Merkmal: 25x3 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;113 Merkmal: 30x7 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;201 Merkmal: 90x9 cm
Artikelnummer-ID: 12470000;110 Merkmal: 30x3 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;132 Merkmal: 40x7 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;56 Merkmal: 100x9 cm
Artikelnummer-ID: 12470000;125 Merkmal: 40x3 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;156 Merkmal: 50x7 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;122 Merkmal: 40x11 cm
Artikelnummer-ID: 12470000; 70 Merkmal: 15x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;170 Merkmal: 60x7 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;151 Merkmal: 50x11 cm
Artikelnummer-ID: 12470000; 89 Merkmal: 20x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;180 Merkmal: 70x7 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;165 Merkmal: 60x11cm
Artikelnummer-ID: 12470000;99 Merkmal: 25x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;193 Merkmal: 80x7 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;174 Merkmal: 70x11 cm
Artikelnummer-ID: 12470000;111 Merkmal: 30x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;114 Merkmal: 30x9 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;189 Merkmal: 80x11 cm
Artikelnummer-ID: 12470000;130 Merkmal: 40x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;134 Merkmal: 40x9 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;198 Merkmal: 90x11 cm
Artikelnummer-ID: 12470000;154 Merkmal: 50x5 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;158 Merkmal: 50x9 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;50 Merkmal: 100x11 cm
	Artikelnummer-ID: 12470000;172 Merkmal: 60x9 cm	Artikelnummer-ID: 12470000;59 Merkmal: 120x11 cm

 <p>Unterarm-Fix-Verbandschiene Ute mit Klettverschluss</p>	<p>Artikelnummer-ID: 10845000;132 Merkmal:40x7 cm</p> <p>Artikelnummer-ID: 10845000;111 Merkmal:30x5 cm</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Medizinprodukt der Klasse 1  

1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Fix-Verbandschienen werden zur Ruhigstellung, Lagerung und Unterstützung von verletzten Extremitäten (Arm – Hand – Fuß) oder nach operativen Eingriffen eingesetzt. Sie bestehen aus Schaumstoff mit integrierten Aluminiumeinlagen.
- Die Unterarm-Fix-Verbandschiene (Art. 10845000) wird zur Fixierung des Arms bei Infusionen verwendet.
- Die Fix-Verbandschienen sind röntgenfähig.
- Vor Verschmutzung werden sie durch einen abwaschbaren Bezug geschützt.
- Durch die Aluminiumeinlage werden sie biegsam und lassen sich individuell an die entsprechende Extremität anpassen.
- Bevor der Stützverband angelegt wird, sollte die zu behandelnde Extremität mit einem Verband versorgt werden.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Die Fix-Verbandschiene nie direkt auf nackter Haut und auf offene Wunden legen.
- Es ist empfehlenswert die zu behandelnde Extremität vor Anlegen der Fix-Verbandschiene mit einem Verband zu versorgen.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Bei gleichzeitige Nutzung anderer Produkte Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Das Produkt ist nur für die Versorgung eines Patienten ausgelegt; an diesem kann es mehrfach verwendet werden.
- Die Fix-Verbandschienen sind regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu prüfen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.

- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung kann mit milden, ph-neutralen krankenhaushaus- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln vorgenommen werden.

Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, Bruchstellen) achten. Sobald grobe Verschleißerscheinungen oder Schäden zu erkennen sind, muss die Fix-Verbandschiene ausgetauscht werden.

Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.
Große Hitzeeinwirkungen und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

5. Entsorgung

Die Fix-Verbandschiene (Schaumstoff mit Aluminiumeinlage) kann über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de