



## Fingerschiene nach Kienle (Metalllagerungsschienen)



### Fingerschiene Henry

Artikelnummer-ID: 12700000;285

Merkmal: Gr.1, 29 cm lang

Artikelnummer-ID: 12700000;288

Merkmal: Gr.2, 26 cm lang

Artikelnummer-ID: 12700000;289

Merkmal: Gr.3, 23 cm lang

Artikelnummer-ID: 12700000;292

Merkmal: Gr.4, 20 cm lang

Artikelnummer-ID: 12700000;295

Merkmal: Gr.5, 18 cm lang

Medizinprodukt der Klasse 1



### 1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Anwendung erfolgt durch Fachpersonal.
- Die Kienle-Fingerschiene kann bei Fingerverletzungen zum Stützen, Ruhigstellen und Lagern eingesetzt werden. Zusätzlich kann sie zur Ruhigstellung des Handgelenks benutzt werden, da sie einen relativ breiten Armschild hat. Die Anwendung erfolgt von Fachpersonal.
- Fingerverletzungen sind unter anderem Frakturen, Bänderverletzungen und Wunden
- Bevor der Stützverband angelegt wird, sollte der zu behandelnde Finger mit einem einfachen Verband überzogen werden.
- Die kunststoffbeschichtete Drahtschiene ist sehr flexibel und lässt sich individuell anpassen.

### Als Zusatzprodukte erhältlich:



Einmalpolster zu Kienle Fingerschienen aus Schaumstoff, jeweils 5 Stück pro Packung:

Artikelnummer-ID: 12700500;249

Merkmal: Gr.1

Artikelnummer-ID: 12700500;262

Merkmal: Gr.2

Artikelnummer-ID: 12700500;275

Merkmal: Gr.3

Artikelnummer-ID: 12700500;278

Merkmal: Gr.4

Artikelnummer-ID: 12700500;279

Merkmal: Gr.5

## 2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Die Kienle-Fingerschienen sowie deren Komponenten sind regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu prüfen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Die kunststoffbeschichtete Drahtschiene nie direkt auf nackter Haut und auf offenen Wunden tragen.
- Es ist empfehlenswert den zu behandelnden Finger mit einem einfachen Verband zu versorgen.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Das Produkt ist nur für die Versorgung eines Patienten ausgelegt; an diesem kann es mehrfach verwendet werden.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

## 3. Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung der Kienle-Fingerschienen kann mit milden, PH-neutralen krankenhaushaus- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln vorgenommen werden. Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen. Die Polster sind nicht zum Reinigen geeignet und sollten nach Gebrauch erneuert werden.

#### **4. Wartung und Pflege:**

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten) achten.

#### **5. Entsorgung**

Die Kienle-Fingerschienen werden über den Hausmüll / Restmüll entsorgt.

**Dr. Paul Koch GmbH**, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;  
www.dr-koch.de, [info@dr-koch.de](mailto:info@dr-koch.de)