



Böhler-Fingerschienen (Metalllagerungsschienen)



Fingerschiene Hendrick
Artikelnummer-ID: 12710000;306
Merkmal: Kerbe, 23 cm



Fingerschiene Michael
Artikelnummer-ID: 12710000;352
Merkmal: Rund, 23 cm



Fingerschiene Clemens
Artikelnummer-ID: 12710000;335
Merkmal: Öse, 23 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Böhler-Fingerschiene kann bei Fingerverletzungen zum Stützen, Ruhigstellen und Lagern eingesetzt werden. Die Anwendung erfolgt von Fachpersonal.
- Fingerverletzungen sind unter anderem Frakturen, Bänderverletzungen und Wunden
- Durch den Aluminiumdraht ist die Böhler-Fingerschiene sehr flexibel und lässt sich individuell anpassen. Die Schiene mit Einkerbung bzw. Öse eignet sich besonders dort, wo der Finger etwas gestreckt werden soll, weil der durch die Einkerbung bzw. Öse gezogene Verband nicht abrutschen kann.
- Die Fingerschiene ist röntgenfähig.

Als Zusatzprodukte erhältlich:



Einmalpolster, passend zu den Böhler-Fingerschienen Hendrick, Michael und Clemens, aus Schaumstoff, jeweils 5 Stück pro Packung:

Artikelnummer-ID: 12710600;0

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Die Aluminium-Drahtschiene nie direkt auf nackter Haut und auf offene Wunden tragen. Es ist empfehlenswert, den zu behandelnden Finger mit einem einfachen Verband zu versorgen.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Die Böhler-Fingerschienen sowie deren Komponenten sind regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu prüfen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Das Produkt ist nur für die Versorgung eines Patienten ausgelegt; an diesem kann es mehrfach verwendet werden.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung der Böhler-Fingerschienen kann mit milden, ph-neutralen krankenhauses- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln vorgenommen werden. Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten) achten.

5. Entsorgung

Die Böhler-Fingerschiene wird über den Hausmüll / Restmüll entsorgt.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de