



Fingerschiene, gebogen (Metallagerungsschienen)



Fingerschiene Lars, gebogen, gepolstert

Artikelnummer-ID: 12730000;120

Merkmal: 40 mm lang

Artikelnummer-ID: 12730000;173

Merkmal: 65 mm lang

Artikelnummer-ID: 12730000;47

Merkmal: 100 mm lang

Artikelnummer-ID: 12730000;66

Merkmal: 150 mm lang

Artikelnummer-ID: 12730000;72

Merkmal: 180 mm lang

Medizinprodukt der Klasse 1



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Fingerschiene wird zur Ruhigstellung und Fixierung von Fingern verwendet. Sie ist aus Aluminium und mit PU-Schaumstoff gepolstert. Dadurch ist sie röntgenfähig und individuell anpassbar.
- Die einseitig mit Schaumstoff gepolsterte gebogene Aluminiumschiene besteht aus einem 1 mm dicken Aluminium und einer Schaumstoffbeschichtung aus ca. 5 mm.
- Durch die hohe Biegsamkeit kann die Fingerschiene der Fingerform optimal angepasst werden.
- Die Anwendung erfolgt durch Fachpersonal.
- Bevor der Stützverband angelegt wird, sollte der zu behandelnde Finger mit einem einfachen Verband überzogen werden.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Die Fingerschiene nie direkt auf verletzter Haut und auf offenen Wunden tragen. Es ist empfehlenswert, den zu behandelnden Finger mit einem einfachen Verband zu versorgen.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.
- Die Fingerschiene ist regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu prüfen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Das Produkt ist nur für die Versorgung eines Patienten ausgelegt; an diesem kann es mehrfach verwendet werden.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Die Fingerschiene ist zum einmaligen Gebrauch gedacht und nicht zum Reinigen geeignet. Nach Gebrauch sollte das Produkt entsorgt werden.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten) achten.

5. Entsorgung

Die Fingerschiene wird über den Hausmüll / Restmüll entsorgt.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de