

Fingerhülsen aus Bast (Kunststofflagerungsschienen)



Fingerhülse Lennart aus Bast

Artikelnummer-ID: 12781001;249
Merkmal: Gr.1


Artikelnummer-ID: 12781001;262
Merkmal: Gr.2

Artikelnummer-ID: 12781001;275
Merkmal: Gr.3

Artikelnummer-ID: 12781001;278
Merkmal: Gr.4

Artikelnummer-ID: 12781001;279
Merkmal: Gr.5

Artikelnummer-ID: 12781001;280
Merkmal: Gr.6

Medizinprodukt der Klasse 1  

1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die Fingerhülsen sind zur Aus- und Neueinrichtung der Finger bzw. Hand bei Frakturen vorgesehen.
- Die Anwendung erfolgt von Fachpersonal, der Patient ist stets unter Aufsicht.
- Die Fingerhülsen so weit wie möglich zusammenschieben, dadurch weitet sich die Hülse, um sie dann über die Finger zu stülpen.
- Stülpen Sie die Hülse soweit wie möglich über das Fingermittelgelenk.
- Ziehen Sie nun vorsichtig am Haken und die Hülse umfasst den Finger fest. Aus dieser Position können Sie die Extension durchführen.
- Die Hülsen können in den Bügel mit 5 Kettchen eingehängt und an einer Extensionswinde befestigt werden, mit der die anschließende Zugkraft aufgebracht wird. Ein Teil der Frakturen richtet sich allein durch Zug und Gegenzug ein; der andere Teil muss manuell eingerichtet werden.
- Um die Fingerhülse wieder vom Finger zu lösen, verfahren Sie in umgekehrter Weise.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Fingerhülsen aus Bast setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte Rücksprache halten mit einem Arzt
- Achtung: nie auf offene Wunden oder Verletzungen anbringen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt während der Anwendung.
- Schäden und Mängel (Bruchstellen oder andere schadhafte Stellen an der Oberfläche) an den Fingerhülsen müssen sofort dem Anwender gemeldet und die Hülsen ausgetauscht werden.
- Bei Zug auf die verletzten Finger bzw. Hand muss vorsichtig vorgegangen werden; den Patienten dabei immer beobachten. Zu starker Zug kann zu Verletzungen führen.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Reinigung und Desinfektion:

Die Basthülsen sollten nicht aufbereitet werden, die Einmalanwendung ist ratsam.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten: stets auf die Unversehrtheit des Materials achten und durch neue Basthülsen ersetzen sobald an der Oberfläche der Hülse Schäden zu erkennen sind.

5. Entsorgung

Die Fingerhülsen aus Bast können über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.

6. Umgebungsbedingungen:

Für Transport und Lagerzeiten bis 3 Monate gelten folgende Lagerbedingungen:
Das Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.

Große Hitzeeinwirkung und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Beim Gebrauch ist die Umgebungstemperatur von 10°C bis 40°C einzuhalten.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de