



Stack-Fingerschienen (Kunststofflagerungsschienen)



Stack-Schiene Lia, weiß

Artikelnummer-ID: 13000100;259
Merkmal: Gr.1

Artikelnummer-ID: 13000100;272
Merkmal: Gr.2

Artikelnummer-ID: 13000100;291
Merkmal: Gr.3

Artikelnummer-ID: 13000100;294
Merkmal: Gr.4

Artikelnummer-ID: 13000100;297
Merkmal: Gr.5

Artikelnummer-ID: 13000100;282
Merkmal: Gr.6

Artikelnummer-ID: 13000100;284
Merkmal: Gr.7

Stack-Schiene Ida, hautfarben

Artikelnummer-ID: 13000110;442
Merkmal: Gr.00

Artikelnummer-ID: 13000110;420
Merkmal: Gr.0

Artikelnummer-ID: 13000110;287
Merkmal: Gr.1

Artikelnummer-ID: 13000110;272
Merkmal: Gr.2

Artikelnummer-ID: 13000110;291
Merkmal: Gr.3

Artikelnummer-ID: 13000110;294
Merkmal: Gr.4

Artikelnummer-ID: 13000110;297
Merkmal: Gr.5

Artikelnummer-ID: 13000110;424
Merkmal: Gr.5,5

Artikelnummer-ID: 13000110;282
Merkmal: Gr.6

Artikelnummer-ID: 13000110;284
Merkmal: Gr.7



Stack-Schiene Max gepolstert, weiß

Artikelnummer-ID: 13000101;287

Merkmal: Gr.1

Artikelnummer-ID: 13000101;272

Merkmal: Gr.2

Artikelnummer-ID: 13000101;291

Merkmal: Gr.3

Artikelnummer-ID: 13000101;294

Merkmal: Gr.4

Artikelnummer-ID: 13000101;297

Merkmal: Gr.5

Artikelnummer-ID: 13000101;282

Merkmal: Gr.6

Artikelnummer-ID: 13000101;284

Merkmal: Gr.7

Stack-Schiene Jan gepolstert, hautfarben

Artikelnummer-ID: 13000111;287

Merkmal: Gr.1

Artikelnummer-ID: 13000111;272

Merkmal: Gr.2

Artikelnummer-ID: 13000111;291

Merkmal: Gr.3

Artikelnummer-ID: 13000111;294

Merkmal: Gr.4

Artikelnummer-ID: 13000111;297

Merkmal: Gr.5

Artikelnummer-ID: 13000111;282

Merkmal: Gr.6

Artikelnummer-ID: 13000111;284

Merkmal: Gr.7

Medizinprodukt der Klasse 1



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

Anwendung Stack-Schiene



- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Die **Stack-Fingerschiene** unterstützt das distale Gelenk des Fingers in Extension und ermöglicht gleichzeitig eine ungehinderte Bewegung des DIP-Gelenks (Fingerendgelenk).
- Sie besteht u.a. aus einem thermoplastischen Acrylharzkunststoff, der zur Verbesserung der Trageeigenschaft mehrfach perforiert ist und so einer Hautmazeration entgegenwirken kann.
- Empfehlenswert ist, den zu behandelnden Finger mit einem einfachen Verband zu überziehen.
- Die Befestigung erfolgt mit Pflasterstreifen oder Klettband und gewährleistet so einen festen Sitz.
- Indikation: Strecksehnenverletzung, Fraktur, Bandverletzung, Luxation, Nagelbettverletzung.
- Nicht anwenden bei starken Schwellungen; offenen, entzündeten Wunden und Materialunverträglichkeit.
- Das Produkt ist nur für die Versorgung eines Patienten ausgelegt.

Als Zusatzprodukte erhältlich:

- Klettband Lilly in den Varianten klein (Artikelnummer-ID: 13000000;307) oder groß (Artikelnummer-ID: 13000000;299)



- Etui zur Aufbewahrung der Stack-Schienen (Artikel-ID: 1300701;0)



- Auch erhältlich als Fingerschienen Satz im Etui:

Fingerschienen-Satz, weiß

Artikelnummer-ID: 13000102;0

Merkmal: Set a 4 Stück, Gr.1-6 im Etui

Fingerschienen-Satz, hautfarben

Artikelnummer-ID: 13000113;0

Merkmal: Set a 4 Stück, Gr.1-6 im Etui

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Achtung: nie auf offene Wunden oder Verletzungen anbringen.
- Die Fingerschienen sowie deren Komponenten sind regelmäßig vor jeder Benutzung per Sichtkontakt auf Materialunversehrtheit (Bruchstellen, scharfe Kanten oder Unebenheiten an der Oberfläche) zu untersuchen, um mögliche Verletzungsgefahren auszuschließen.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Taubheitsgefühlen einen Arzt oder Fachpersonal aufsuchen.
- Bei gleichzeitiger Nutzung anderer Produkte, Rücksprache halten mit einem Arzt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den korrekten Sitz und Halt des Produkts während der Anwendung.

- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehene Zubehör verwendet wird.
- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Auswahl der Größe und Schienenanpassung

Die Stack Fingerschienen sind auf der folgenden Seite im Maßstab 1:1 abgebildet, um die Auswahl der Größe zu erleichtern. ----- **siehe Seite 5** -----

Über einer Flamme (Bunsenbrenner, etc.) und auch im heißen Wasser lässt sich dieses Material nachformen. Die Kappe über der Phalanx media kann mit einem Klettband oder Pflaster fixiert werden.

Es ist trotz vielfältiger Verbesserungen dieser Schienen ratsam, den zu behandelten Finger mindestens mit einem Schlauchverband zu überziehen. Besser noch ist ein Auskleiden der Schiene mit einem dünnen Filz, dann ist Mazeration nicht möglich.

4. Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung der Stack-Fingerschiene kann mit milden, ph-neutralen krankenhauses- und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln vorgenommen werden. Die anschließende Desinfektion kann ebenfalls mit einfachen handelsüblichen Desinfektionsmitteln erfolgen.

Die Klettbänder sowie die gepolsterten Fingerschienen sind nicht zur Feuchtreinigung geeignet.

5. Wartung und Pflege:

Die Fingerschienen sollten nach jeder Reinigung und vor jeder Anwendung auf Unversehrtheit des Materials kontrolliert werden.

6. Entsorgung

Die Stack-Fingerschienen können über den Hausmüll / Restmüll entsorgt werden.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de

Schienenengößen im Maßstab 1:1

