




Anti-Decubitus-Auflage (Schaumstofflagerungsschienen)

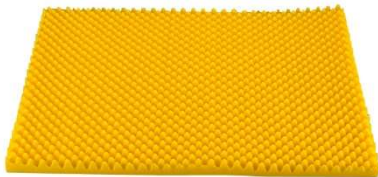

Anti-Decubitus-Auflage Eva, strukturiert, atmungsaktiv

Artikelnummer-ID: 14000200;169

Merkmal: 60x60 cm

Artikelnummer-ID: 14000200;200

Merkmal: 90x60 cm

Artikelnummer-ID: 14000200;76

Merkmal: 195x90 cm

Medizinprodukt der Klasse 1



1. Allgemeine Angaben / Zweckbestimmung / Indikation:

- Es handelt sich um ein Medizinprodukt (Sondergrößen sind ausgenommen) nach MDR.
- Sorgt für optimale Belüftung der aufliegenden Körperstellen. Durch die speziell gestaltete Oberfläche der Auflage wird eine optimale Druckverteilung des gesamten Körpergewichts erzielt und dadurch wird die Bildung von Druckgeschwüren vermieden.
- Einsatzmöglichkeiten: Krankenhaus, Reha, Physiotherapie, häuslichen Pflege.

2. Sicherheitshinweise

- Handhabung und Benutzung der Produkte setzt die genaue Beachtung dieser Sicherheitshinweise voraus.
- Das Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanleitung genannten Einsatzzwecke bestimmt. Jede andere Verwendung ist vom Hersteller nicht zulässig.
- Nie direkt mit verletzter Haut oder offenen Wunden in Kontakt kommen.
- Vor jeder Nutzung das Produkt auf Unversehrtheit der Oberfläche und andere Schäden untersuchen.
- Der Hersteller ist für die Sicherheit und Funktion des Produkts nur dann verantwortlich, wenn die Zweckbestimmung eingehalten wird und nur eigens für dieses Produkt vorgesehenes Zubehör verwendet wird.

- **Meldepflicht für schwerwiegende Vorfälle:** Alle schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, müssen dem Hersteller und der jeweils zuständigen Behörde unverzüglich gemeldet werden (info@dr-koch.de).

3. Material, Reinigung und Desinfektion:

Die Anti-Decubitus-Auflage ist aus Polyurethan-(PUR-)Weichschaumstoff hergestellt.

PUR-Weichschaumstoffe sind flexible, offenporige Schaumstoffe, die bei Auslieferung folgende Eigenschaften haben:

- Sie haben einen spezifischen Eigengeruch, der bereits nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmbar ist.
- PUR-Weichschaumstoffe neigen dazu, bei Lichteinwirkung an der Oberfläche zu vergilben.
- PUR-Schaumstoff ist nach heutigem Stand der Erkenntnisse physiologisch unbedenklich. Allgemein löst PUR-Weichschaumstoff keine allergischen Hautreaktionen aus.

Reinigung und Desinfektion:

Da die Schaumstoffprodukte offenporig sind, sind sie vor verunreinigenden Flüssigkeiten zu schützen.

Das blanke, offenporige Schaumstoffprodukt ist nicht desinfizierbar.

4. Wartung und Pflege:

Keine Besonderheiten, außer auf die Unversehrtheit des Materials (z.B. Unebenheiten, raue Kanten, kaputter Reißverschluss) achten.

5. Entsorgung

Die Entsorgung kann über den Hausmüll / Restmüll erfolgen.

Dr. Paul Koch GmbH, Im Geiselrain 7, D-72636 Frickenhausen, Tel: +49 (0) 7022 / 40595 – 0;
www.dr-koch.de, info@dr-koch.de